



JDENTALCARE

just smile

JD NEX

Rozszerz możliwości kliniczne



Połączenie stożkowe



Made in Italy

ROZSZERZ MOŻLIWOŚCI KLINICZNE

System implantologiczny JDNeX opracowano tak, aby zapewniał maksymalną wszechstronność zastosowań klinicznych - od uzupełnień pojedynczych braków zębowych po zaawansowane rekonstrukcje pełnołukowe wykonywane w koncepcji Full Arch.

PROGRESYWNY GWINT

Agresywny gwint w części apikalnej, połączony z masywniejszym gwintem w obszarze kości korowej, zwiększa zaangażowanie struktur kostnych i wspiera uzyskanie optymalnej stabilizacji pierwotnej.

KRAWĘDZIE TNĄCE

Krawędzie tnące, sięgające aż do części apikalnej, zwiększają zdolność implantu do samonacinania, zapewniają płynniejsze wprowadzanie oraz optymalną kontrolę podczas pozycjonowania implantu.

PROFIL HYBRYDOWY

Geometria implantu łącząca cylindryczny odcinek koronowy ze stożkową częścią apikalną sprzyja optymalnemu dopasowaniu do anatomicznego kształtu korzenia zęba, wspierając kontrolowane osadzenie implantu i wysoką stabilizację pierwotną.

POZYCJONOWANIE SUBKRESTALNE

Zmniejszona średnica platformy implantu umożliwia głębsze pozycjonowanie subkrestalne oraz zapewnia bardziej kontrolowane zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantu.

WZMOCNIONA ŚCIANA KORONOWA

Wzmocniona grubość ściany w części koronowej zwiększa wytrzymałość strukturalną oraz niezawodność biomechaniczną w obszarach poddanych większym obciążeniom funkcjonalnym.

POŁĄCZENIE STOŻKOWE 16°


Precyzyjnie zaprojektowany system zapewniający szczelne połączenie, stabilność mechaniczną oraz optymalne właściwości funkcjonalne, nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni protetycznej, dzięki zastosowaniu cieńszych łączników protetycznych.

GŁĘBOKIE POŁĄCZENIE

Zwiększona powierzchnia kontaktu pomiędzy łącznikiem a implantem, redukująca naprężenia i zapewniająca lepsze dopasowanie.

JEDNA PLATFORMA PROTETYCZNA

Jednolita platforma protetyczna o średnicy Ø3,0 mm w całej gamie implantów.

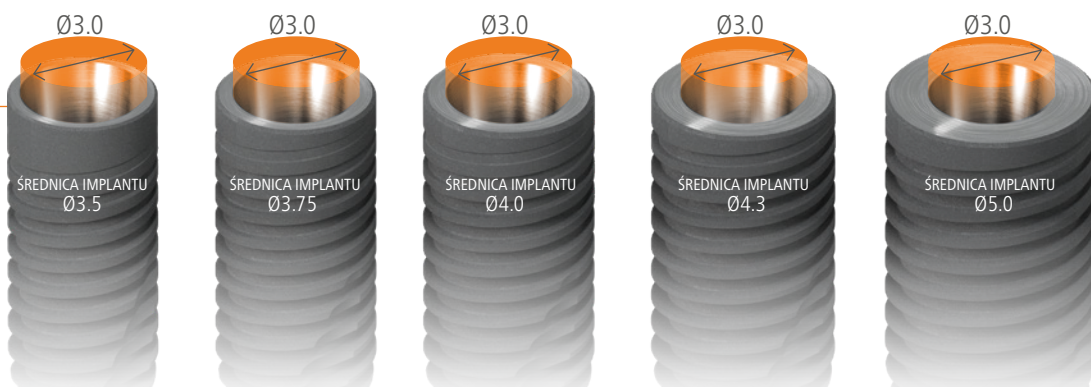


SPECYFIKACJA PRODUKTU

Implanty stomatologiczne JDNeX są dostępne w średnicach i długościach podanych w poniższej tabeli:

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA WIERCHOŁKOWA	INTERFEJS ŁĄCZNIKA
Ø 3.5	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.4	3
Ø 3.75	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.4	3
Ø 4.0	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.6	3
Ø 4.3	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.8	3
Ø 5.0	8, 10, 11.5, 13	3.1	3

Uwaga: wszystkie wymiary podane są w milimetrach (mm)

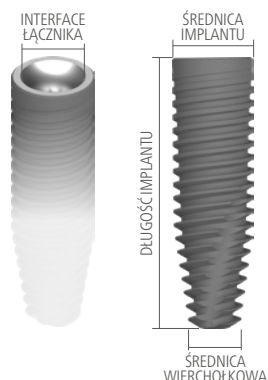

KATALOG PRODUKTÓW

Implanty:

Ø 3.5

NE35080	JDNeX Ø 3.5 L 8
NE35100	JDNeX Ø 3.5 L 10
NE35115	JDNeX Ø 3.5 L 11.5
NE35130	JDNeX Ø 3.5 L 13
NE35150	JDNeX Ø 3.5 L 15
NE35180	JDNeX Ø 3.5 L 18

Ø 3.75

NE37080	JDNeX Ø 3.75 L 8
NE37100	JDNeX Ø 3.75 L 10
NE37115	JDNeX Ø 3.75 L 11.5
NE37130	JDNeX Ø 3.75 L 13
NE37150	JDNeX Ø 3.75 L 15
NE37180	JDNeX Ø 3.75 L 18

Ø 4.0


NE40080	JDNeX Ø 4.0 L 8
NE40100	JDNeX Ø 4.0 L 10
NE40115	JDNeX Ø 4.0 L 11.5
NE40130	JDNeX Ø 4.0 L 13
NE40150	JDNeX Ø 4.0 L 15
NE40180	JDNeX Ø 4.0 L 18

Ø 4.3

NE43080	JDNeX Ø 4.3 L 8
NE43100	JDNeX Ø 4.3 L 10
NE43115	JDNeX Ø 4.3 L 11.5
NE43130	JDNeX Ø 4.3 L 13
NE43150	JDNeX Ø 4.3 L 15
NE43180	JDNeX Ø 4.3 L 18

Ø 5.0

NE50080	JDNeX Ø 5.0 L 8
NE50100	JDNeX Ø 5.0 L 10
NE50115	JDNeX Ø 5.0 L 11.5
NE50130	JDNeX Ø 5.0 L 13

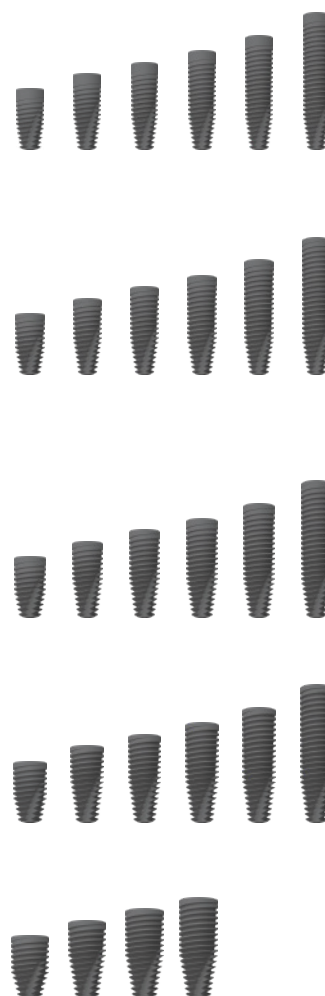

Śruby zamykające:

NECS	Śruba zamykająca JDNeX
------	------------------------



Śruby gojące:


NEHA43	Śruba gojąca Ø 4.0 H 3.0 JDNeX
NEHA45	Śruba gojąca Ø 4.0 H 5.0 JDNeX
NEHA47	Śruba gojąca Ø 4.0 H 7.0 JDNeX
NEHA53	Śruba gojąca Ø 5.0 H 3.0 JDNeX
NEHA55	Śruba gojąca Ø 5.0 H 5.0 JDNeX
NEHA57	Śruba gojąca Ø 5.0 H 7.0 JDNeX
NEHA63	Śruba gojąca Ø 6.0 H 3.0 JDNeX
NEHA65	Śruba gojąca Ø 6.0 H 5.0 JDNeX
NEHA67	Śruba gojąca Ø 6.0 H 7.0 JDNeX
NEHA753	Śruba gojąca Ø 7.5 H 3.0 JDNeX
NEHA755	Śruba gojąca Ø 7.5 H 5.0 JDNeX



Transfery wyciskowe:

Łyżka otwarta:

NEICOTC	Transfer wyciskowy łyżka otwarta z hexem JDNeX
NEICOTNEC	Transfer wyciskowy łyżka otwarta bez hexa JDNeX
NEICOTS	Śruba do transferu wyciskowego łyżka otwarta JDNeX
NEICOTLC	Transfer wyciskowy długi łyżka otwarta z hexem JDNeX
NEICOTNELC	Transfer wyciskowy długi łyżka otwarta bez hexa JDNeX
NEICOTSL	Śruba długa do transferu wyciskowego łyżka otwarta JDNeX

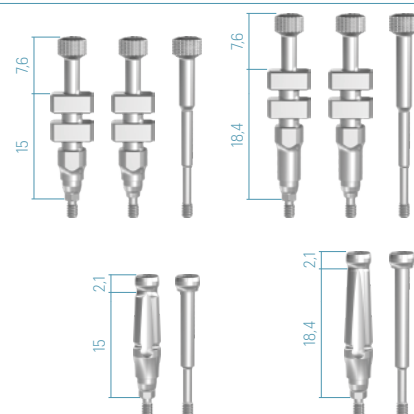


Łyżka zamknięta:

NEICCTC	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta z hexem JDNeX
NEICCTS	Śruba do transferu wyciskowego łyżka zamknięta JDNeX
NEICCTLC	Transfer wyciskowy długi łyżka zamknięta z hexem JDNeX
NEICCTLS	Śruba długa do transferu wyciskowego łyżka zamknięta JDNeX

Łączniki tymczasowe:

NETAEC	Łącznik tymczasowy z hexem JDNeX
NETANEC	Łącznik tymczasowy bez hexa JDNeX

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm

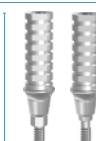

Łączniki proste:

NESA4510C	Łącznik prosty Ø 4.5 H 1.5 JDNeX
NESA4520C	Łącznik prosty Ø 4.5 H 2.0 JDNeX
NESA4520NEC	Łącznik prosty bez hexa Ø 4.5 H 2.0 JDNeX
NESA4540C	Łącznik prosty Ø 4.5 H 4.0 JDNeX
NESA4540NEC	Łącznik prosty bez hexa Ø 4.5 H 4.0 JDNeX
NESA5020C	Łącznik prosty Ø 5.0 H 2.0 JDNeX
NESA5020NEC	Łącznik prosty bez hexa Ø 5.0 H 2.0 JDNeX
NESA5040C	Łącznik prosty Ø 5.0 H 4.0 JDNeX
NESA5040NEC	Łącznik prosty bez hexa Ø 5.0 H 4.0 JDNeX
NESA6020C	Łącznik prosty Ø 6.0 H 2.0 JDNeX
NESA6040C	Łącznik prosty Ø 6.0 H 4.0 JDNeX

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Łączniki GP:

NEGPA40C	Łącznik GP Ø 4.0 JDNeX
NEGPA50C	Łącznik GP Ø 5.0 JDNeX
NEGPA60C	Łącznik GP Ø 6.0 JDNeX
NE15GPAEC	Łącznik GP 15° JDNeX
NE25GPAEC	Łącznik GP 25° JDNeX

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Łączniki anatomiczne:

NE15A15C	Łącznik anatomiczny kątowy 15° Ø 5.0 H 1.5 JDNeX
NE15A30C	Łącznik anatomiczny kątowy 15° Ø 5.0 H 3.0 JDNeX
NE25A15C	Łącznik anatomiczny kątowy 25° Ø 5.0 H 1.5 JDNeX
NE25A30C	Łącznik anatomiczny kątowy 25° Ø 5.0 H 3.0 JDNeX

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Łączniki chromowo-kobaltowe:

NECCEC	Łącznik chromowo-kobaltowy z hexem JDNeX
NECCNEC	Łącznik chromowo-kobaltowy bez hexa JDNeX

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Śruby protetyczne:

NES	Śruba protetyczna krótka JDNeX
NESL	Śruba protetyczna długa JDNeX
NEST	Śruba protetyczna do łącznika tymczasowego, chromowo-kobaltowego oraz premilla JDNeX
NESA	Śruba protetyczna kątowa JDNeX

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Łączniki typu multi-unit:

NENCA15C	Łącznik typu multi-unit prosty H 1.5 JDNeX
NENCA30C	Łącznik typu multi-unit prosty H 3.0 JDNeX
NENCA40C	Łącznik typu multi-unit prosty H 4.0 JDNeX
NECA1725C	Łącznik typu multi-unit kątowy 17° H 2.5 JDNeX
NECA1735C	Łącznik typu multi-unit kątowy 17° H 3.5 JDNeX
NECA3025C	Łącznik typu multi-unit kątowy 30° H 2.5 JDNeX
NECA3035C	Łącznik typu multi-unit kątowy 30° H 3.5 JDNeX
EVCAPS	Śruba protetyczna do łącznika typu multi-unit JDEvolution*
EVCAPSA	Śruba do łącznika typu multi-unit kątowego JDEvolution*
EVCAPSN:	Śruba protetyczna do łącznika typu multi-unit Direct N**
EVCAPSNA	Śruba protetyczna kątowa do łącznika typu multi-unit Direct N
EVCAICOTEC	Transfer wyciskowy do łącznika typu multi-unit łyżka otwarta z hexem JDEvolution*
EVCAICOTC	Transfer wyciskowy do łącznika typu multi-unit łyżka otwarta JDEvolution*
EVCAICOTLC	Transfer wyciskowy długi do łącznika typu multi-unit łyżka otwarta JDEvolution*
EVCAICOT02	Śruba do transfera wyciskowego do łącznika typu multi-unit łyżka otwarta JDEvolution*
EVCAICOT04	Śruba do transfera wyciskowego długiego do łącznika typu multi-unit łyżka otwarta JDEvolution*
EVCAICTC	Transfer wyciskowy do łącznika typu multi-unit łyżka zamknięta*
EVCAHC	Czapeczka gojąca do łącznika typu multi-unit JDEvolution*
EVCAHCL	Czapeczka gojąca do łącznika typu multi-unit H 6.0 JDEvolution*
EVCAHC9	Czapeczka gojąca do łącznika typu multi-unit H 9.0 JDEvolution*
EVCAHCB	Czapeczka gojąca do łącznika typu multi-unit Peek JDEvolution*
EVCAGPAEC	Łącznik GP z hexem do łącznika typu multi-unit JDEvolution*
EVCAGPANEC	Łącznik GP bez hexa do łącznika typu multi-unit JDEvolution*
EVCATANEWSC	Łącznik tymczasowy bez hexa do gładkiego spawania do łącznika typu multi-unit JDEvolution*
EVCATANEC	Łącznik tymczasowy bez hexa do łącznika typu multi-unit JDEvolution*
EVCATANEWEC	Łącznik tymczasowy bez hexa do spawania do łącznika typu multi-unit JDEvolution*
EVCAWANEC	Łącznik Wax-Up bez hexa do łącznika typu multi-unit*
EVCAAR	Analog do łącznika typu multi-unit

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment
obrotowy: 15 Ncm



Zalecany moment
obrotowy: 15 Ncm



Zalecany moment
obrotowy: 15 Ncm

*Zalecane użycie kluczyka protetycznego JDEvolution
**Zalecane użycie kluczyka protetycznego JDEvolution Plus

TiBase, JDScanBody i analogi CAD CAM:

NESBCEC	ScanBody z hexem JDNeX
EVCASBCEC	ScanBody do łącznika typu multi-unit JDEvolution
EVCASBCEEC	ScanBody z hexem do łącznika typu multi-unit
EVCASBCEC:	On Top ScanBody do łącznika typu multi-unit JDEvolution Plus*
JDSCGIOSE	ScanBody Full Arch Tracer Hexagonal
JDSCGIOS	ScanBody Full Arch Tracer
JDSCGIOSR	ScanBody Rectangular Full Arch Tracer

NETIBC	TiBase z hexem Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDNeX
NETIBNEC	TiBase bez hexa Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDNeX
NETIB15C	TiBase z hexem Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDNeX
NETIB15NEC	TiBase bez hexa Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDNeX
NETIB30C	TiBase z hexem Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDNeX
NETIB30NEC	TiBase bez hexa Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDNeX
NETIBNC	TiBase długa z hexem Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDNeX
NETIBNENC	TiBase długa bez hexa Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDNeX
NETIB15NC	TiBase długa z hexem Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDNeX
NETIB15NENC	TiBase długa bez hexa Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDNeX
NETIB20NC	TiBase długa z hexem Ø4.4 H 2.0 C 7.7 JDNeX
NETIB20NENC	TiBase długa bez hexa H 2.0 C 7.7 JDNeX
NETIB30NC	TiBase długa z hexem Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDNeX
NETIB30NENC	TiBase długa bez hexa Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDNeX
NETIB40NC	TiBase długa z hexem Ø4.4 H 4.0 C 7.7 JDNeX
NETIB40NENC	TiBase długa bez hexa Ø4.4 H 4.0 C 7.7 JDNeX

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm

NETIBNAC	TiBase długa z przekierowaniem z hexem Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDNeX
NETIBNENAC	TiBase długa z przekierowaniem bez hexa Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDNeX
NETIB15NAC	TiBase długa z przekierowaniem z hexem Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDNeX
NETIB15NENAC	TiBase długa z przekierowaniem bez hexa Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDNeX
NETIB30NAC	TiBase długa z przekierowaniem z hexem Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDNeX
NETIB30NENAC	TiBase długa z przekierowaniem bez hexa Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDNeX



Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm

EVCAITEC	Interfejs CAD CAM z hexem do łącznika typu multi-unit (H 7.5)
EVA139C	Baza z hexem do łącznika typu multi-unit (H 5.0)
EVCAITC	Interfejs CAD CAM bez hexa do łącznika typu multi-unit JDEvolution (H 7.3)
EVCATIBC	Baza do łącznika typu multi-unit JDEvolution (H 5.0)
EVCAITAC	Interfejs z przekierowaniem CAD CAM bez hexa do łącznika typu multi-unit (H 7.7)
EVS110	Śruba protetyczna do łącznika typu multi-unit bezpośrednia
EVS111	Śruba protetyczna do łącznika typu multi-unit bezpośrednia długa
EVS112	Śruba protetyczna do kątownego kanału łącznika typu multi-unit bezpośrednia
NEANC	Analog implantu CAD CAM JDNeX
EVCAARCN	Analog łącznika typu multi-unit CAD CAM
NEPMNC	Pre-milled JDNeX



Zalecany moment
obrotowy: 15 Ncm



Zalecany moment
obrotowy: 15 Ncm

*Zalecane użycie kluczyka protetycznego JDEvolution Plus

Łączniki typu Mini multi-unit:


NENCA15MIC	Łącznik typu multi-unit MINI H 1.5 JDNeX
NENCA30MIC	Łącznik typu multi-unit MINI H 3.0 JDNeX
NENCA40MIC	Łącznik typu multi-unit MINI H 4.0 JDNeX
EVCAHCMIC	Czapeczka gojąca do łącznika typu multi-unit MINI
EVCAHCLMIC	Czapeczka gojąca do łącznika typu multi-unit MINI H 6.0
EVCAITMIC	Baza CAD CAM bez hexa H 7.0 do łącznika typu multi-unit MINI
EVCAITMIEC	Baza CAD CAM z hexem H 7.0 do łącznika typu multi-unit MINI
EVCATIBMIC	Baza CAD CAM bez hexa H 5.0 do łącznika typu multi-unit MINI
EVCATIBMIEC	Baza CAD CAM z hexem H 5.0 do łącznika typu multi-unit MINI
EVCATANEMIC	Łącznik tymczasowy bez hexa do łącznika typu multi-unit MINI
EVCAICOTMIC	Transfer wyciskowy łyżka otwarta do łącznika typu multi-unit MINI
EVCAICOTMIEC	Transfer wyciskowy z hexem łyżka otwarta do łącznika typu multi-unit MINI
EVCAARMIC	Analog do łącznika typu multi-unit MINI
EVCAARMIC	Analog CAD CAM do łącznika typu multi-unit MINI
EVCASBCEMIC	ScanBody do łącznika typu multi-unit MINI
EVCASBCEMIEC	ScanBody z hexem do łącznika typu multi-unit MINI
EVCASBCESMIC:	On Top ScanBody do łącznika typu multi-unit MINI



Łączniki kulkowe:

NEBA15	Łącznik kulkowy H 1.5 JDNeX
NEBA30	Łącznik kulkowy H 3.0 JDNeX
NEBA50	Łącznik kulkowy H 5.0 JDNeX
EVBAA	Analog łącznika kulkowego
EVBAHC	Nasadka elastyczna z pojemnikiem do łącznika kulkowego
EVBAN	Nasadka retencyjna do łącznika kulkowego

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm

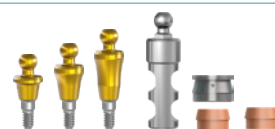

Łączniki Emi:

NEEMI15	Łącznik Emi H 1.5 JDNeX
NEEMI30	Łącznik Emi H 3.0 JDNeX
NEEMI50	Łącznik Emi H 5.0 JDNeX
EVEMISCK	Smart Cap Attachment do łącznika Emi
EVEMIHC	Nasadka elastyczna z pojemnikiem do łącznika Emi
EVEMIN	Nasadka elastyczna retencyjna (1.2 kg) do łącznika Emi
EVEMIH	Pojemnik na nasadki Emi
EVEMIIC	Transfer wyciskowy plastikowy do łącznika Emi
EVEMIICS	Transfer wyciskowy stalowy do łącznika Emi
EVEMINT	Biała nasadka retencyjna (1.8 kg) do łącznika Emi
EVEMINY	Żółta nasadka retencyjna (0.6 kg) do łącznika Emi
EVEMINP	Fioletowa nasadka retencyjna (2.5 kg) do łącznika Emi
EVEMINB	Nasadka retencyjna laboratoryjna do łącznika Emi
EVEMIEIT	Narzędzie do wyjmowania i wstawiania nasadek
EVEMIA	Analog łącznika Emi

Zalecany moment
obrotowy: 30 Ncm



Analog implantu:

NEAN	Analog implantu JDNeX	
------	-----------------------	---

Bone Mill:

NEBM5C.	Bone Mill Ø 5.0 oraz Guide JDNeX	
NEBM6C.	Bone Mill Ø 6.0 oraz Guide JDNeX	
NEBMGN	Bone Mill Guide JDNeX	


Narzędzia:

NEID	Przenośnik do implantu JDNeX	
NEIDL	Przenośnik długi do implantu JDNeX	
NESDPF20	Kluczyk protetyczny ręczny L 20 JDNeX	
NESDPF25	Kluczyk protetyczny ręczny L 25 JDNeX	
NESDPF35	Kluczyk protetyczny ręczny L 35 JDNeX	
EVSDCAF	Kluczyk do łącznika typu multi-unit ręczny	
NESDP25	Kluczyk protetyczny maszynowy L 25 JDNeX	
NESDP30	Kluczyk protetyczny maszynowy L 30 JDNeX	
EVSDCA	Kluczyk do łącznika typu multi-unit maszynowy	
EVSDPF20	Kluczyk protetyczny maszynowy L 20	
EVSDPF25	Kluczyk protetyczny maszynowy L 25	
EVSDPF35	Kluczyk protetyczny maszynowy L 35	
EVSDPF25A	Kluczyk do bazy z przekierowaniem ręczny L 25	
EVSDPF30A	Kluczyk do bazy z przekierowaniem ręczny L 30	
EVSDPF25AV	Kluczyk do kątownej śruby multi-unit Direct JDTorque L 25	
EVSDPF30AV	Kluczyk do kątownej śruby multi-unit Direct JDTorque L 30	
EVSDP32AV	Kluczyk do śruby multi-unit Direct EVS112 (kanał prosty)	
NEATR27	Kluczyk do wyjmowania łącznika L 27 JDNeX	
NEATR34	Kluczyk do wyjmowania łącznika L 34 JDNeX	
EVSD	Narzędzie chirurgiczne JDEvolution	
JDG	JDGuide	

PROTOKOŁY WIERCENIA

Zaleca się stosowanie wskazówek dotyczących następującego protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu.

ŚREDNICA IMPLANTU	MIEKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	KOŚĆ O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
Ø 3,5	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 + Countersink Ø 3.5
Ø 3,75	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 opcjonalnie	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 + Countersink Ø 3.75
Ø 4,0	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 opcjonalnie	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 + Countersink Ø 4.0
Ø 4,3	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 opcjonalnie	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 + Countersink Ø 4.3
Ø 5,0	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 opcjonalnie	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0+ Countersink Ø 5.0

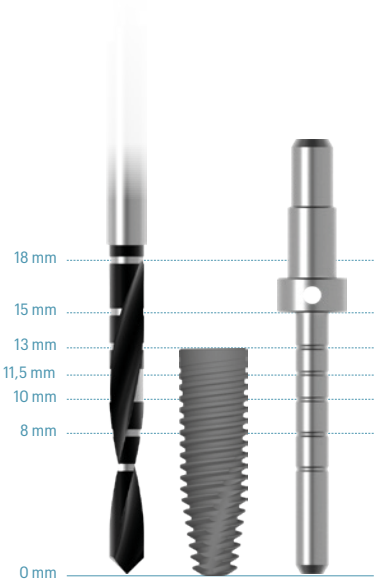

Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm