




J DENTAL CARE

just smile

JD EVOLUTION plus

Łatwe wprowadzenie, naturalna stabilność

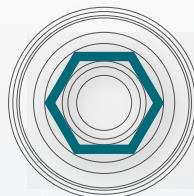



Połączenie heksagonalne



Wyprodukowano we Włoszech

ŁATWE WPROWADZENIE, NATURALNA STABILNOŚĆ

- Wewnętrzne połączenie heksagonalne z fazą wprowadzającą
- Anatomiczna szyjka koronowa
- Rozszerzający się, stożkowy trzon wewnętrzny
- Zdolność do samogwintowania w obu kierunkach
- Apikalne krawędzie tnące
- Połączenie rozpoznawane przez wszystkie główne biblioteki cyfrowe
- Redukuje koncentrację naprężeń w kości wyrostka zębodołowego i maksymalizuje objętość kości wokół szyjki implantu, zapewniając stabilność tkanek twardych i miękkich
- Powierzchnia implantu w pełni pokryta powierzchnią SLA
- Umożliwia osiągnięcie wysokiej pierwotnej stabilizacji

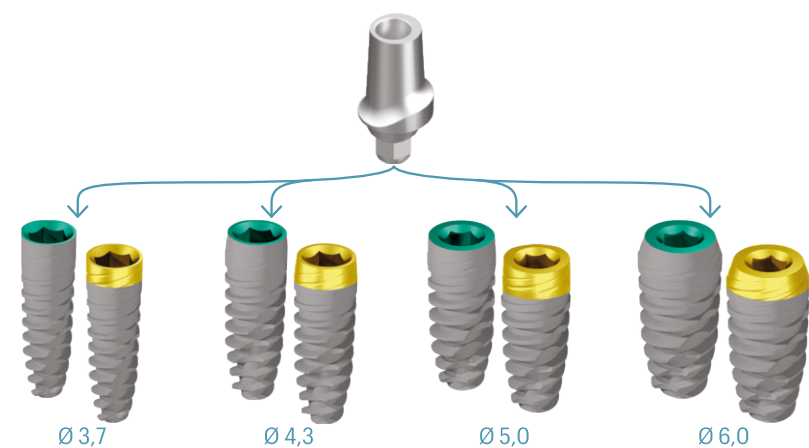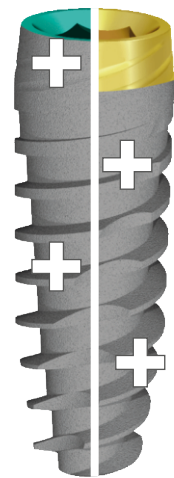

JEDNO POŁĄCZENIE PROTETYCZNE

Jedno uniwersalne połączenie protetyczne dla wszystkich średnic

SPECYFIKACJA PRODUKTU


Implanty JDEvolution Plus są dostępne w następujących średnicach i długościach:

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ	ŚR. KOŃCÓWKI	ŚR. PLATFORMY	INTERFEJS ABUTMENTU
Ø 3.7	8	2.8	3.7	3.4
	10, 11.5, 13, 15, 18	2.4		
Ø 4.0	8	2.8	3.8	3.4
	10	2.5		
	11.5, 13	2.4		
Ø 4.3	6	3.82	4.0	3.4
	8	3.55		
	10, 11.5, 13, 15, 18	2.8		
Ø 5.0	6	3.85	4.8	3.4
	8, 10, 11.5, 13, 15	3.2		
Ø 6.0	6	4.4	5.0	3.4
	8	4.1		
	10, 11.5, 13, 15	4		

Implanty JDEvolution Plus T są dostępne w następujących średnicach i długościach:

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ	ŚR. KOŃCÓWKI	ŚR. PLATFORMY	INTERFEJS ABUTMENTU
Ø 4.0	6	2.6	3.8	3.4
	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.4		

Uwaga: Wszystkie wymiary podano w milimetrach

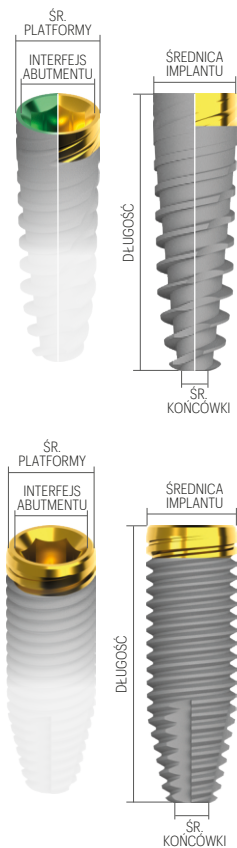

Implanty:

Ø 3,7

EV37080:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 8
EV37100:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 10
EV37115:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 11,5
EV37130:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 13
EV37150:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 15
EV37180:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 18




Ø 4,0

EV40080:	JDEvolution Plus Ø 4,0 L 8
EV40100:	JDEvolution Plus Ø 4,0 L 10
EV40115:	JDEvolution Plus Ø 4,0 L 11,5
EV40130:	JDEvolution Plus Ø 4,0 L 13



Ø 4,3

EV43060:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 6
EV43080:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 8
EV43100:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 10
EV43115:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 11,5
EV43130:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 13
EV43150:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 15
EV43180:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 18

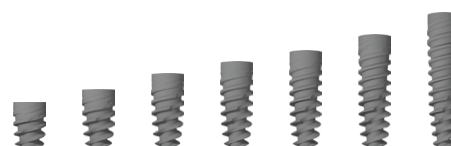

Ø 5,0

EV50060:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 6
EV50080:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 8
EV50100:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 10
EV50115:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 11,5
EV50130:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 13
EV50150:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 15
EV50180:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 18



Ø 6,0

EV60060:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 6
EV60080:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 8
EV60100:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 10
EV60130:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 13
EV60150:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 15



Implanty Anodowana Szyjka:

Ø 3,7

EVA37080:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 8
EVA37100:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 10
EVA37115:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 11,5
EVA37130:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 13
EVA37150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 15
EVA37180:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 18

Ø 4,0

EVA40150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 15
EVA40180:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 18

Ø 4,3


EVA43060:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 6
EVA43080:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 8
EVA43100:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 10
EVA43115:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 11,5
EVA43130:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 13
EVA43150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 15
EVA43180:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 18

Ø 5,0

EVA50060:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 6
EVA50080:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 8
EVA50100:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 10
EVA50115:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 11,5
EVA50130:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 13
EVA50150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 15
EVA50180:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 18


Ø 6,0

EVA60060:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 6
EVA60080:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 8
EVA60100:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 10
EVA60115:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 11,5
EVA60130:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 13
EVA60150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 15

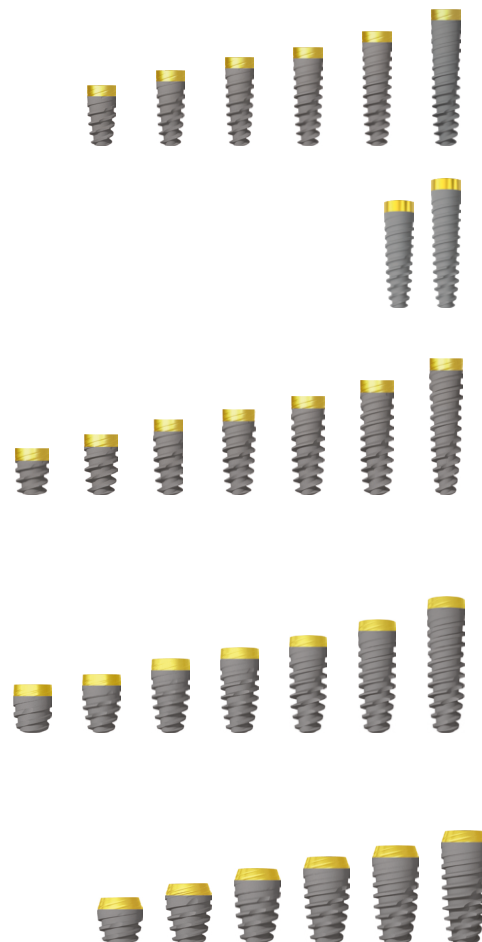

JDEvolution Plus T:


EVT40060:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 6
EVT40080:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 8
EVT40100:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 10
EVT40115:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 11,5
EVT40130:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 13
EVT40150:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 15
EVT40180:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 18

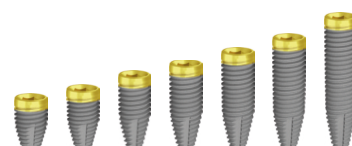

PROTOKOŁY WIERCENIA

Zaleca się stosowanie wskazówek dotyczących następującego protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu.

ŚREDNICA IMPLANTU	WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA	
	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ
przygotowanie miejsca w szczęce				
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 przy wejściu
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L6-8 mm 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L6 mm
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
przygotowanie miejsca w żuchwie				
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 3,2 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 4,0 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 4,8 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4

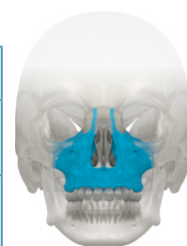

**Implant krótki L 6 mm
JDEvolution Plus –
wszczepienie w szczęce**

krótki
Ø 4,3
L 6

Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm i Ø 2,4 mm
Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4

krótki
Ø 5,0
L 6

Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm i Ø 2,4 mm
Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4D




**Implant krótki L 6 mm
JDEvolution Plus –
wszczepienie w żuchwie**

krótki
Ø 4,3
L 6

Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm i Ø 2,8 mm
Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4D

krótki
Ø 5,0
L 6

Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm i Ø 2,8 mm
Zakończ wiertłem Ø 5 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS5

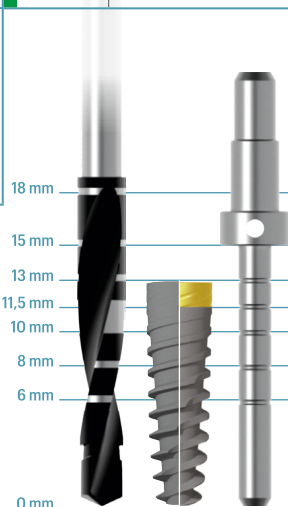

Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm

PROTOKOŁY WIERCENIA – IMPLANTY Ø 4,0

Zaleca się stosowanie wskazówek dotyczących następującego protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu.

ŚREDNICA IMPLANTU	WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA		
	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	
przygotowanie miejsca w szczęcie					Implant krótki L 6 mm JDEvolution Plus – wszczepienie w szczęcie
Ø 4,0	2.0 2.4 2.8	2.0 2.4 2.8 3.2 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2.0 2.4 2.8 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2.0 2.4 2.8	krótki Ø 4,0 L 6 Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm i Ø 2,4 mm Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4
przygotowanie miejsca w żuchwie					Implant krótki L 6 mm JDEvolution Plus – wszczepienie w żuchwie
Ø 4,0	2.0 2.4 2.8 3.2 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 3.6 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2.0 2.4 2.8 3.2 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 3.6 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	krótki Ø 4,0 L 6 Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm i Ø 2,8 mm Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4D

Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm