




J DENTAL CARE

just smile

JD ICON PLUS

System implantacji

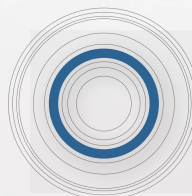

Połączenie stożkowe




Made in Italy

SYSTEM IMPLANTACJI OBRÓBKA POWIERZCHNI


JEDNO POŁĄCZENIE dla wszystkich rozmiarów elementów, co upraszcza procedurę odbudowy

DOSKONAŁA PIERWOTNA STABILNOŚĆ nawet w trudnych warunkach kostnych

DUŻY ASORTYMENT KOMPONENTÓW PROTETYCZNYCH do najlepszych efektów estetycznych

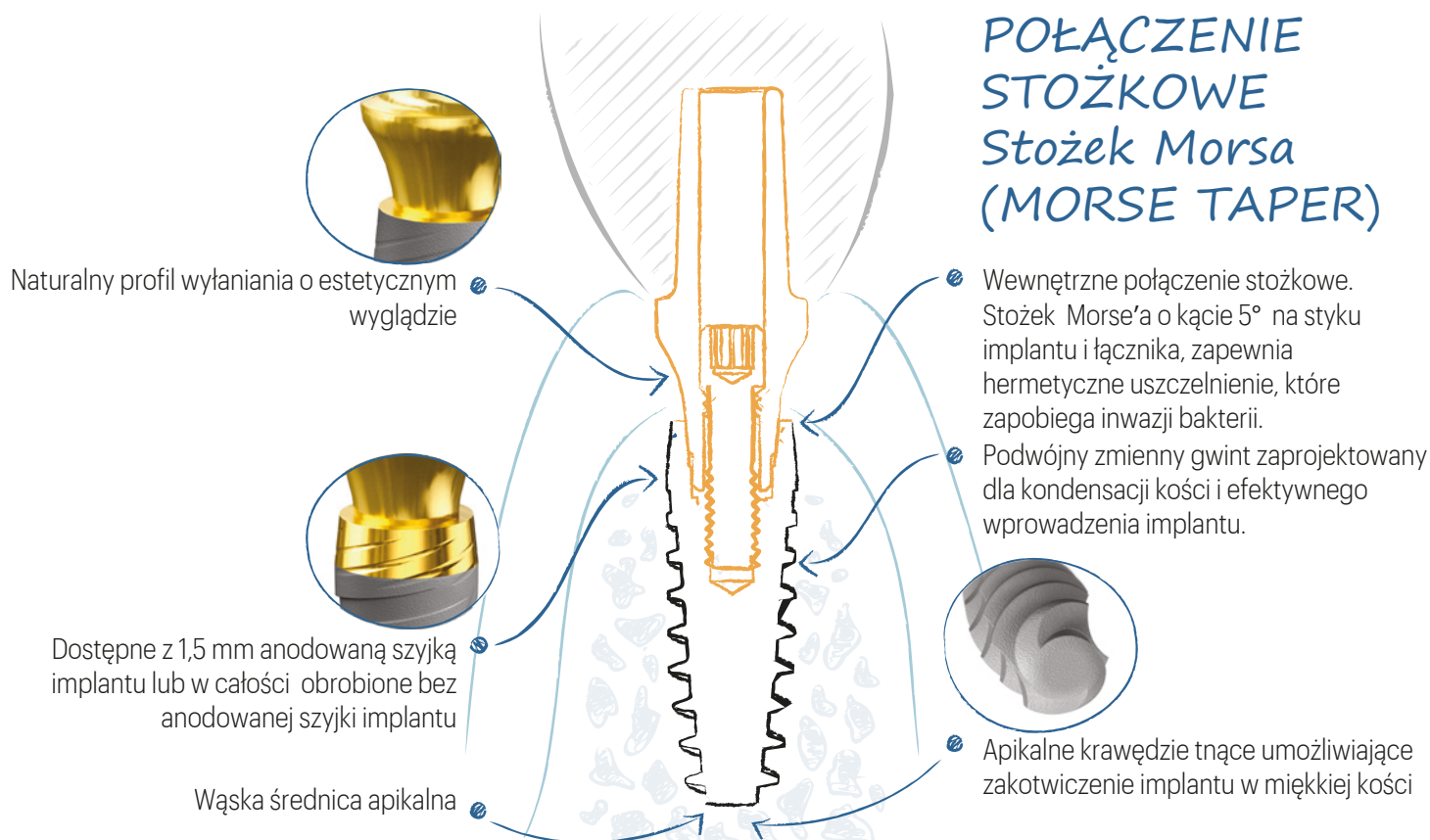

OBRÓBKA POWIERZCHNI IMPLANTU

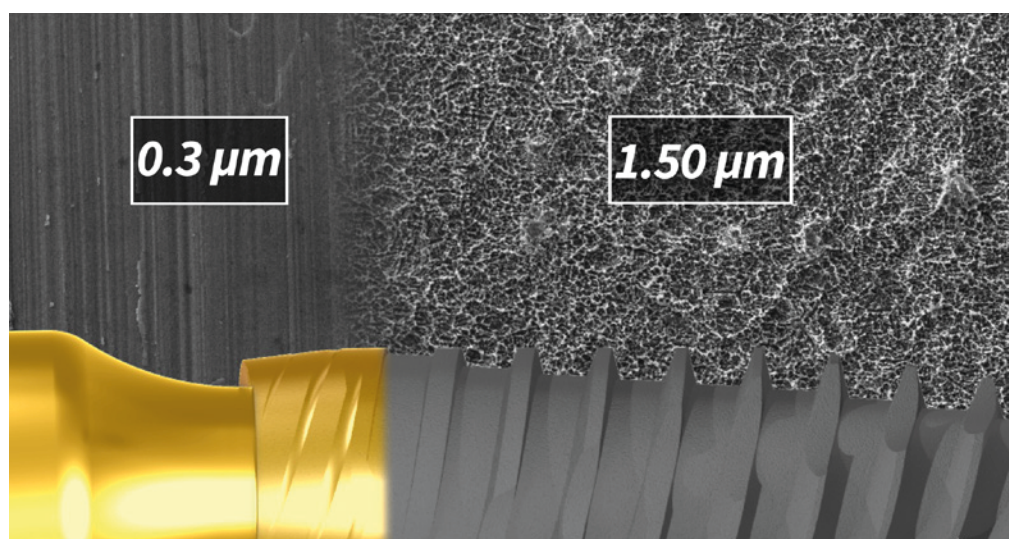

Implanty stomatologiczne JDIcon Plus są dostępne w dwóch wersjach:

1. W całości powierzchnię poddaną obróbce SLA.
2. Z anodowaną szyjką implantu o wysokości 1,5 mm oraz powierzchnią poddaną obróbce SLA.

Powierzchnia SLA jest uzyskiwana poprzez proces piaskowania dużymi cząstkami oraz trawienia kwasowego (SLA), co gwarantuje optymalną mikroporowatą powierzchnię implantu i umożliwia skuteczną osteointegrację.


Uwaga: Powyższy obraz został wygenerowany za pomocą mikroskopu skaningowego elektronowego (SEM) i przedstawia wartości chropowatości, wyrażone jako Ra, dwóch powierzchni implantu poddanych obróbce SLA i anodowaniu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU


Implanty stomatologiczne JDIcon Plus są dostępne w średnicach i długościach podanych w poniższej tabeli:

ŚREDNICA IMPLANTU	ŚREDNICA WIERZCHOŁKOWA	INTERFEJS ŁĄCZNIKA	ŚREDNICA PLATFORMY	DŁUGOŚĆ						
Ø 3,7	2,4	3,1	3,7		8	10	11,5	13	15	18
Ø 4,3	2,8	3,1	4,0	6	8	10	11,5	13	15	18
Ø 5,0	3,2	3,1	4,8	6	8	10	11,5	13		

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w milimetrach (mm).

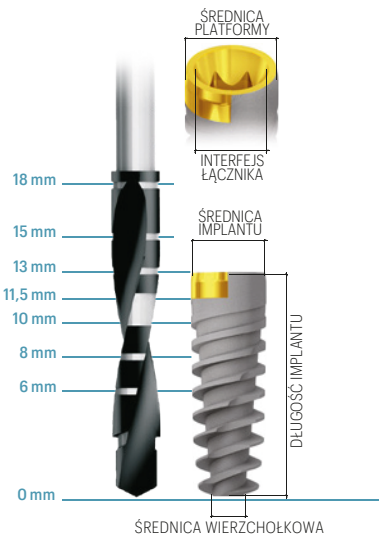

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA KOŃCÓWKI	ŚREDNICA PLATFORMY	INTERFEJS ŁĄCZNIKA
JDIcon Plus				
Ø 3,7	8	2.8	3.7	3.1
	10, 11.5, 13, 15, 18	2.4		
Ø 4,3	6	2.4	3.8	3.1
	8	3.55	4	
	10, 11.5, 13, 15, 18	2.8		
Ø 5,0	6	2.8	4.7	3.1
	8	3.2	4.8	
	10, 11.5, 13			
JDIcon Plus PT				
Ø 4,0	13, 15, 18, 20	2.4	4.0	3.1
JDIcon Plus LE				
Ø 4,0	18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2.4	4.0	3.1

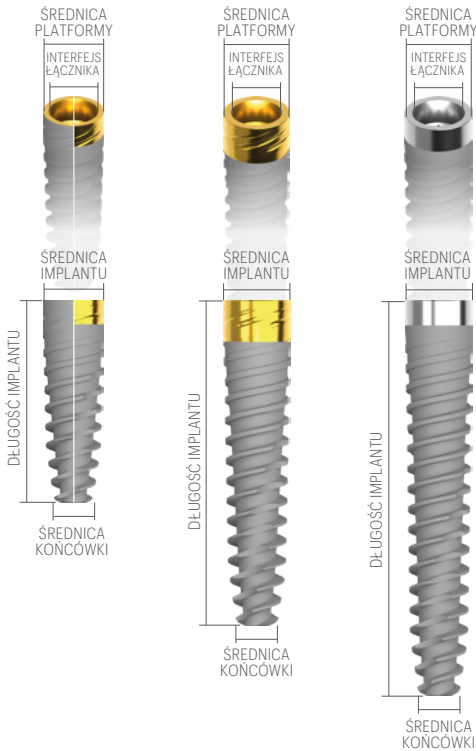

KATALOG PRODUKTÓW

Uwaga: wszystkie wymiary średnic i długości podane są w mm

JDIcon Plus:

Ø 3,7


IC37080.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 8
IC37100.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 10
IC37115.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 11,5
IC37130.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 13
IC37150.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 15
IC37180.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 18

Ø 4,3

IC43060.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 6
IC43080.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 8
IC43100.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 10
IC43115.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 11,5
IC43130.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 13
IC43150.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 15
IC43180.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 18

Ø 5,0

IC50060.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 6
IC50080.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 8
IC50100.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 10
IC50115.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 11,5
IC50130.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 13

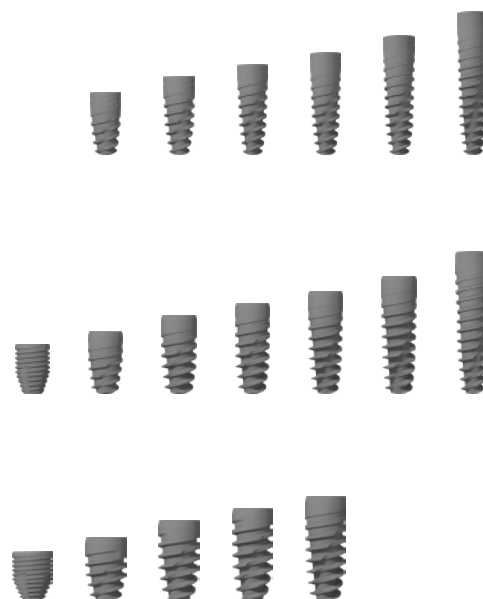

JDIcon Plus (anodowana szyjka):

Ø 3,7

IC37080,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 8
IC37100,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 10
IC37115,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 11,5
IC37130,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 13
IC37150,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 15
IC37180,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 18

Ø 4,3

IC43060,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 6
IC43080,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 8
IC43100,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 10
IC43115,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 11,5
IC43130,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 13
IC43150,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 15
IC43180,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 18

Ø 5,0

IC50060,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 6
IC50080,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 8
IC50100,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 10
IC50115,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 11,5
IC50130,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 13




JDIcon Plus PT:

ICPT40130.	JDIcon Plus PT Ø 4.0 L 13
ICPT40150.	JDIcon Plus PT Ø 4.0 L 15
ICPT40180.	JDIcon Plus PT Ø 4.0 L 18
ICPT40200.	JDIcon Plus PT Ø 4.0 L 20

JDIcon Plus LE:

ICNAE40180.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 18
ICNAE40200.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 20
ICNAE40220.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 22
ICNAE40240.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 24
ICNAE40260.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 26
ICNAE40280.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 28
ICNAE40300.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 30

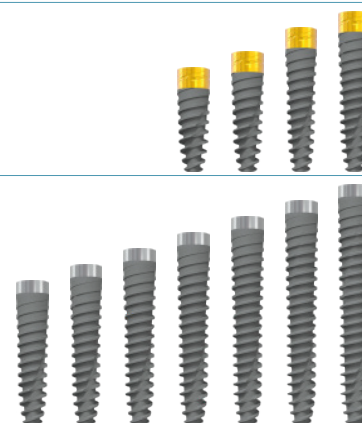

Rozwiązania protetyczne:

Uwaga: Wszystkie komponenty protetyczne są takie same jak w linii implantów JDIcon Plus.

Uwaga: W celu zapoznania się z procedurą chirurgiczną dotyczącą wszczepiania implantów JDIcon Plus PT oraz JDIcon Plus LE, prosimy o skorzystanie z instrukcji chirurgicznej dostępnej na stronie www.jdentalcare.com

PROTOKOŁY WIERCENIA

Zaleca się stosowanie wskazówek dotyczących następującego protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu.

	WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA		 Krótki implant L 6mm JDIcon Plus wszczepienie w szczęce	
ŚREDNICA IMPLANTU	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ		
przygotowanie miejsca w szczęce						
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 przy wejściu	 Krótkie Ø 4,3 L 6 Użyj wiertła Ø 4mm L6 JDIcon Plus+ JDDICS4	
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6-8mm 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu		
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm		
przygotowanie miejsca w żuchwie					 Krótki implant L 6mm JDIcon Plus wszczepienie w żuchwie	
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu		
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu 4,0 przy wejściu do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu		
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 przy wejściu 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	Krótkie Ø 5,0 L 6 Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.0mm, Ø 2.4mm i Ø 2.8mm Zakończ wiertłem Ø 5mm L6 JDIcon Plus+ JDDICS5	

Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm