




JDENTAL CARE

just smile

JD NASAL

Zakotwiczenie w obszarze jamy nosowej

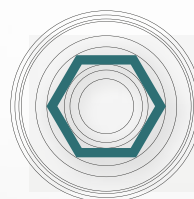

Połączenie heksagonalne




Zaprojektowane dla
Maxilla-For-All®



Made in Italy

ZAKOTWICZENIE W OBSZARZE JAMY NOSOWEJ

W przypadku znacznej resorpcji wyrostka zębodołowego szczęki, implanty JDNasal mogą być stosowane do wykorzystania kości nosowej, ponieważ umożliwiają wykorzystanie kości szczękowej otaczającej. Łoże implantu rozpoczyna się w okolicy przedtrzonowców wyrostka zębodołowego, a kończy w przegrodzie kostnej dzielącej zatokę szczekową i jamę nosową. Implanty stosowane w takich przypadkach muszą być dłuższe aby umożliwić ich przejście przez całą zatokę pod kątem .Implanty JDNasal są dostępne w długości do 30 mm. Szczegóły dotyczące produktu i protokoły wiercenia znajdują się na kolejnych stronach. Chirurg może zdecydować się na jednoczesne wykonanie podniesienia dna zatoki z wszczepieniem implantu lub zrezygnować z zabiegu regeneracyjnego. Ważne jest, aby u pacjentów nie występowały objawy infekcji zatok przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu tego zabiegu.

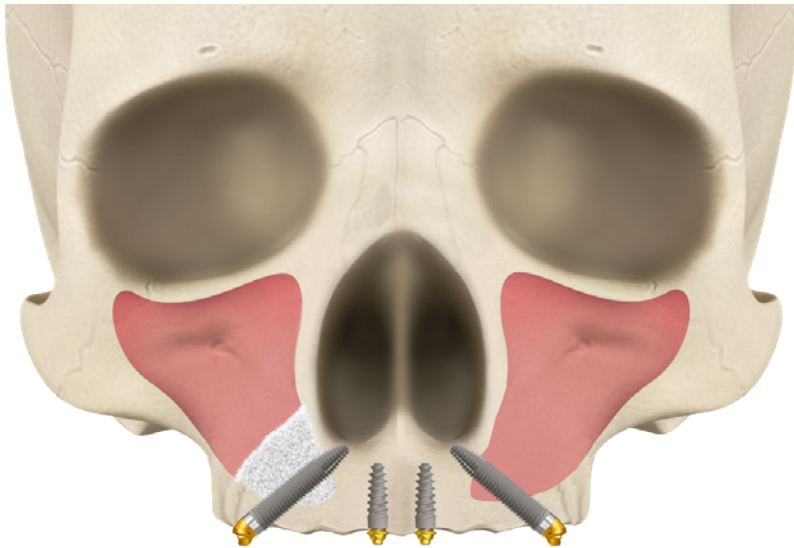

≥ 3 mm kości wyrostka zębodołowego

Specyfikacja produktu

Implanty dentystyczne JDNasal mają kształt cylindryczno-stożkowy z gwintem standardowym lub stożkowy z agresywnym gwintem. W części koronowej posiadają polerowaną szyjkę o wysokości 1,5 mm. Implanty dentystyczne JDNasal są dostępne w średnicach i długościach przedstawionych w poniższej tabeli:

ŚREDNICA IMPLANTU	ŚREDNICA WIERZCHOŁKOWA	DŁUGOŚĆ						
		18	20	22	24	26	28	30
Ø 4,0	2,4							

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w mm




KATALOG PRODUKTÓW

Implanty:

NA40200:	JDNasal Ø 4.0 L 20
NA40220:	JDNasal Ø 4.0 L 22
NA40240:	JDNasal Ø 4.0 L 24
NA40260:	JDNasal Ø 4.0 L 26


IM43180-2	JDNasal Evo Ø 4.0 L 18
NAE40200:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 20
NAE40220:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 22
NAE40240:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 24
NAE40260:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 26
NAE40280:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 28
NAE40300:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 30

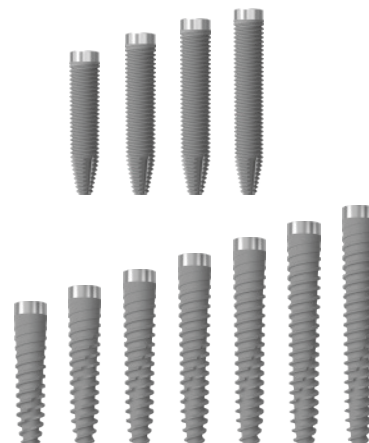

Wiertła i sonda głębokości:

JDNPR	Sonda głębokości 26 mm JDNasal
JDDR20L	Wiertło Ø 2.0 JDNasal*
JDDR24L	Wiertło Ø 2.4 JDNasal*
JDIDNA	Wiertło początkowe JDNasal*
JDDRNA24	Wiertło Helix Ø 2.4 JDNasal*
JDDR20	Wiertło spiralne Ø 2.0
JDDR24	Wiertło spiralne Ø 2.4
JDDR28	Wiertło spiralne Ø 2.8
JDDR32	Wiertło spiralne Ø 3.2
JDDR36	Wiertło spiralne Ø 3.6
JDDIADR101	Wiertło TranZ JDNasal

*te powyższe wiertła są zawarte w kasecie JDNasal Full

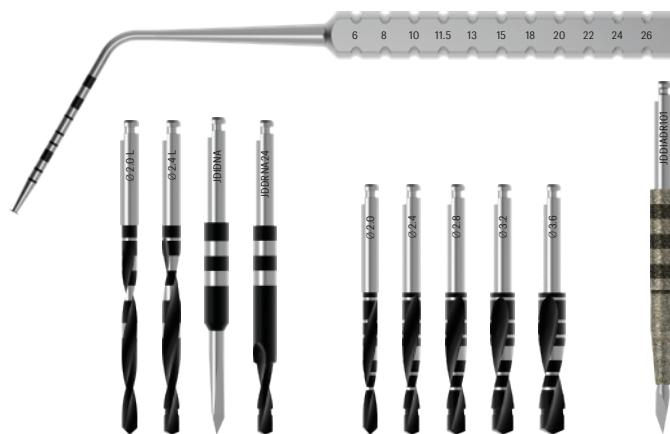

Wiertła pilotujące dla protokołu prowadzonego JDNasal:

JDGD20-180	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 18.0
JDGD20-200	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 20.0
JDGD20-220	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 22.0
JDGD20-240	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 24.0
JDGD20-260	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 26.0
JDGD24-180	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 18.0
JDGD24-200	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 20.0
JDGD24-220	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 22.0
JDGD24-240	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 24.0
JDGD24-260	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 26.0

Uwaga: wszystkie powyższe wiertła są zawarte w kasecie JD do chirurgii nawigowanej – dodatkowe wiertła (JDNasal+JDPTerygo)

JDGD120	JD P.A.G.A Wiertło
JDIDPAGAL	P.A.G.A. Implant Driver Long



Kasety chirurgiczne JD Nasal:

JDNAK	Kaseta chirurgiczna JDNasal
JDNAKF	Kaseta chirurgiczna JDNasal Full
JDKIT02	Kaseta JD do chirurgii nawigowanej – dodatkowe wiertła (JDNasal+JDPTerygo)

Rozwiązania protetyczne:

Połączenie JDNasal jest kompatybilne z linią implantów JDEvolution Plus, dlatego prosimy o zapoznanie się z katalogiem JDEvolution Plus w celu wyboru najbardziej odpowiedniego komponentu.

PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA MIEJSCA TRANS-ZATOKOWEGO

Protokół nieprzewodzony

1. Należy wypreparować okienko w bocznej ścianie zatoki szczękowej i delikatnie odsunąć błonę Schneidera, unikając jej perforacji. Rozpocznij przygotowanie miejsca wszczepienia za pomocą standardowego wiertła spiralnego Ø 2.0 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej. Utrzymuj wiertło pod właściwym kątem w kierunku filaru kła.
2. Kontynuuj przy użyciu standardowego wiertła spiralnego Ø 2.4 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej.
3. Kontynuuj przy użyciu standardowego wiertła spiralnego Ø 2.8 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej.
4. Kontynuuj przy użyciu standardowego wiertła spiralnego Ø 3.2 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej.
5. Wprowadź wiertło początkowe JDNasal do wcześniej utworzonego kanału w kości. Wierć przez wyrostek zębodołowy, wewnątrz i poza zatoką, sięgając kości nosowej w miejscu odpowiadającym filarowi kła.
6. Użyj sondy głębokości 26 mm, aby zweryfikować głębokość miejsca i wspomóc klinicystę w wyborze implantu o odpowiedniej długości.
7. Użyj dłuższego wiertła Ø 2.4 mm JDNasal, aby wiercić tak jak poprzednio przez wyrostek zębodołowy, wewnątrz i poza zatoką, docierając do kości nosowej na końcowej głębokości w miejscu odpowiadającym filarowi kła.
- 8A. Zakończ osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 3.6 mm w wyrostku zębodołowym.
- 8B. W przypadku implantów o długości 28-30 mm zamiast punktów 5-6-7 użyj wiertła JDNasal TranZ Drill, wierząc przez wyrostek zębodołowy, wewnątrz i poza zatoką szczękową, docierając do kości nosowej przy filarze kła.
- 9A. Umieść implant i osiągnij ostateczną pozycję bez dodawania przeszczepu kości. Implant należy wprowadzić z momentem obrotowym między 25 Ncm a 80 Ncm.
- 9B. Opcjonalnie: umieść implant, osiągnij ostateczną pozycję i wprowadź przeszczep kości do zatoki. Implant należy wprowadzić z momentem obrotowym między 25 Ncm a 80 Ncm.



1 - JDDR20



2 - JDDR24



3 - JDDR28



4 - JDDR32



5 - JDIDNA



6 - JDNPR




7 - JDDRNA24




8 - JDDR36



8B - JDDIADR101

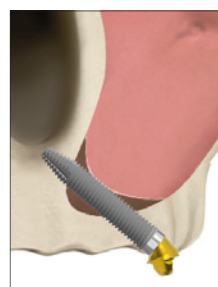

9A - implant

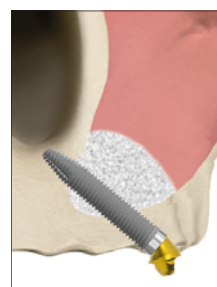

9B - implant + przeszczep kości



PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA MIEJSCA KOTWICZENIA NOSOWEGO

Protokół nieprzewodzony



1 - JDDR20L



2 - JDNPR



3 - JDDR24L



4 - JDDR28



5 - JDDR32



6 - JDDR36



7 - implant

1. Rozpocznij przygotowanie miejsca za pomocą dłuższego wiertła Ø 2.0 mm JDNasal, wierząc przez kość grzbietową i docierając do warstwy korowej kości nosa.
2. W celu sprawdzenia głębokości łoża implantologicznego można użyć sondy o długości 26 mm. Znajomość dokładnej długości łoża ułatwia dobór odpowiedniego wszczepu.
3. Wierć do końcowej głębokości za pomocą dłuższego wiertła Ø 2.4 mm JDNasal.
4. Kontynuuj osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.8 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.
5. Kontynuuj osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 3.2 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.
6. Zakończ osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 3.6 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.
7. Umieść implant, aż do osiągnięcia ostatecznej pozycji. Implant należy wprowadzić z momentem obrotowym między 25 Ncm a 80 Ncm.

Używane narzędzia:



KASETA CHIRURGICZNA JDNASAL

Kaseta chirurgiczna JDNasal została stworzona do przygotowania zabiegów trans-zatokowych i zakotwiczenia w obszarze jamy nosowej.



Zestaw JDNasal (PATENT W TRAKCIE REJESTRACJI)

Kaseta zawiera cztery dłuższe wiertła, specjalnie zaprojektowane do implantów trans-zatokowych:*

- Dłuższe wiertło Ø 2,0 mm JDNasal
- Dłuższe wiertło Ø 2,4 mm JDNasal
- Wiertło początkowe JDNasal
- Wiertło Helix Ø 2,4 mm JDNasal

*Powyższe zdjęcie odnosi się do kasety chirurgicznej JDNasal Full

PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA MIEJSCA

Protokół prowadzony komputerowo

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ IMPLANTU	
Ø 4,0	L20	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L22	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L24	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L26	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 - L26 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 - L26 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w mm



JDentalCare
Logo JDentalCare oraz inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie, z wyjątkiem szczególnie wymienionych wyjątków, są własnością JDentalCare.
Przedstawione w tej broszurze obrazy produktów niekoniecznie są w skali rzeczywistej.
Uwaga: Nie wszystkie produkty wytwarzane przez JDentalCare i przedstawione w tej broszurze zostały zatwierdzone/regulacyjnie dopuszczone do sprzedaży we wszystkich krajach i/lub posiadają licencję zgodnie z przepisami FDA.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnego asortymentu produktów i ich dostępności, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem JDentalCare. Tylko na receptę.
Ostrzeżenie: Federalne prawo USA ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie do licencjonowanych dentystów lub za ich zgodą.
Zapoznaj się z instrukcją użytkowania, aby uzyskać więcej informacji, takich jak wskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania.