



JDENTALCARE

just smile

JD NEX

kaseta chirurgiczna

Rozszerz możliwości kliniczne



Made in Italy

JEDNA KASETA. DWA ROZWIĄZANIA. PEŁNA KONTROLA.

Zaprojektowana wyłącznie dla systemu implantologicznego JDNeX, kasetka chirurgiczna JDNeX łączy dedykowane wiertła, kluczyki oraz akcesoria w ramach uproszczonego protokołu chirurgicznego.

Od wszczepienia pojedynczego implantu po rehabilitację typu Full Arch on X, kasetka wspiera lekarza na każdym etapie zabiegu, zapewniając precyzję, wszechstronność i wygodę pracy.

Intuicyjny układ instrumentarium oraz dwie dostępne konfiguracje – z ogranicznikami wiertel lub bez nich – upraszczają przebieg zabiegu, jednocześnie zapewniając elastyczność niezbędną w różnych sytuacjach klinicznych.



WIERTŁA STANDARDOWE

Dla każdej średnicy implantu opracowano dedykowane wiertła standardowe, przeznaczone do przygotowania łoża implantacyjnego w kości o niskiej gęstości. Ich geometria sprzyja zachowaniu odpowiedniego stopnia kompresji kości, wspierając uzyskanie optymalnej stabilizacji pierwotnej implantu.

WIERTŁA PLUS

Dla każdej średnicy implantu opracowano dedykowane wiertła Plus, przeznaczone do przygotowania łoża implantacyjnego w kości o średniej gęstości. Ich geometria jest ściśle dopasowana do profilu implantu, umożliwiając bardziej kontrolowane przygotowanie łoża implantacyjnego.

WIERTŁA COUNTERSINK

Przeznaczone do opracowania części grzebieniowej łoża implantacyjnego. Wiertła Countersink poprawiają dopasowanie części koronowej implantu oraz zmniejszają naprężenia przenoszone na kość korową.

WIERTŁA ZE STOPERAMI

Stosowane ze stoperami JDNeX, zapewniają precyzyjne i przewidywalne przygotowanie łoża implantacyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu swobody pracy w technice bezszablonowej.



OGRANICZNIKI NA WIERTŁA

System ograniczników montowanych bezpośrednio na wiertłach, zapewniający mechaniczną kontrolę głębokości. Dostępny w wersjach o małej, średniej i dużej średnicy, dopasowanych do każdego wiertła, umożliwia lekarzowi precyzyjną kontrolę osteotomii przy różnych szerokościach wyrostka zębodołowego.



PRZENOŚNIKI I KLUCZYKI

Kompatybilne z implantami JDNeX oraz połączeniami protetycznymi, kluczyki i przenośniki zapewniają precyzyjne i stabilne dopasowanie, gwarantując bezpieczeństwo podczas procedury chirurgicznej.


DWIE KONFIGURACJE. JEDEN PROTOKÓŁ.



KASETA STANDARDOWA - JDNEXK

Pełna swoboda pracy chirurgicznej.

Konfiguracja dedykowana konwencjonalnej implantacji wykonywanej techniką bezszablonową. Zawiera wiertła chirurgiczne, narzędzia do wprowadzania implantów oraz akcesoria niezbędne do przeprowadzenia pełnego protokołu zabiegowego przy zachowaniu pełnej swobody pracy.

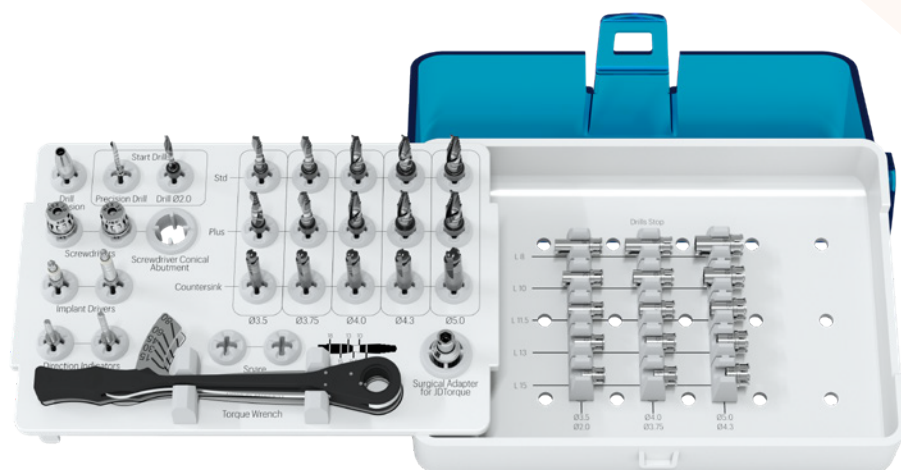

KASETA Z OGRANICZNIKAMI - JDNEXKS

Kontrola i bezpieczeństwo dzięki ogranicznikom.

Ta konfiguracja łączy konstrukcję wiertel JDNeX z systemem ograniczników wiertel. Ograniczniki umożliwiają przygotowanie łoża implantacyjnego do zaplanowanej głębokości, przy jednoczesnym zachowaniu swobody pracy techniką bezszablonową oraz zapewnieniu mechanicznej kontroli głębokości.

WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

WIERTŁO ZAPROJEKTOWANE W OPARCIU O GEOMETRIĘ IMPLANTU

Geometria wiertła odwzorowuje profil implantu, upraszczając protokół wiercenia oraz umożliwiając precyzyjne i kontrolowane przygotowanie łoża implantacyjnego.

PROGRESYWNE KRAWĘDZIE TNĄCE W CZĘŚCI APIKALNEJ


Specjalnie zaprojektowane nacięcia tnące w części wierzchołkowej wiertel umożliwiają stopniowe poszerzanie obszaru apikalnego osteotomii, zapewniając kontrolowaną preparację łoża implantacyjnego



KATALOG PRODUKTÓW

Kasety JDNeX:

JDNeXK	Kaseta chirurgiczna JDNeX
JDNeXKS	Kaseta chirurgiczna z ogranicznikami JDNeX

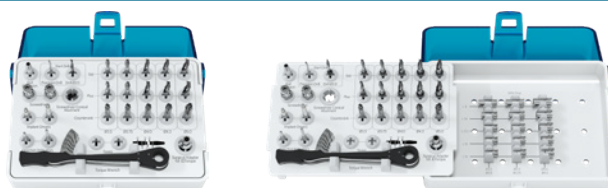

Wiertło pilotujące:

JDPD	Wiertło pilotujące
------	--------------------



Wiertła standardowe:

JDDR20	Wiertło spiralne Ø 2.0
JDDR35NEX	Wiertło stożkowe Ø 3.5 JDNeX
JDDR37NEX	Wiertło stożkowe Ø 3.75 JDNeX
JDDR40NEX	Wiertło stożkowe Ø 4.0 JDNeX
JDDR43NEX	Wiertło stożkowe Ø 4.3 JDNeX
JDDR50NEX	Wiertło stożkowe Ø 5.0 JDNeX
JDDR35NEXP	Wiertło stożkowe Ø 3.5 Plus JDNeX
JDDR37NEXP	Wiertło stożkowe Ø 3.75 Plus JDNeX
JDDR40NEXP	Wiertło stożkowe Ø 4.0 Plus JDNeX
JDDR43NEXP	Wiertło stożkowe Ø 4.3 Plus JDNeX
JDDR50NEXP	Wiertło stożkowe Ø 5.0 Plus JDNeX



Wiertła Standardowe znajdują się w kasce chirurgicznej JDNeXK.

Wiertła ze stoperami:

JDDR20STNEX	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 2.0 JDNeX
JDDR35STNEX	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 3.5 JDNeX
JDDR37STNEX	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 3.75 JDNeX
JDDR40STNEX	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 4.0 JDNeX
JDDR43STNEX	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 4.3 JDNeX
JDDR50STNEX	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 5.0 JDNeX
JDDR35STNEXP	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 3.5 Plus JDNeX
JDDR37STNEXP	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 3.75 Plus JDNeX
JDDR40STNEXP	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 4.0 Plus JDNeX
JDDR43STNEXP	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 4.3 Plus JDNeX
JDDR50STNEXP	Wiertło stożkowe ze stoperem Ø 5.0 Plus JDNeX



Wiertła Standardowe znajdują się w kasce chirurgicznej JDNeXK.

Wiertła Countersink:

JDDR35CSNEX	Wiertło Countersink Ø 3.5 JDNeX
JDDR37CSNEX	Wiertło Countersink Ø 3.75 JDNeX
JDDR40CSNEX	Wiertło Countersink Ø 4.0 JDNeX
JDDR43CSNEX	Wiertło Countersink Ø 4.3 JDNeX
JDDR50CSNEX	Wiertło Countersink Ø 5.0 JDNeX



Ograniczniki na wiertła:

JDDRST80-1NEX	Ogranicznik L 8 na wiertło Ø 2.0-3.5 JDNEX
JDDRST100-1NEX	Ogranicznik L 10 na wiertło Ø 2.0-3.5 JDNEX
JDDRST115-1NEX	Ogranicznik L 11.5 na wiertło Ø 2.0-3.5 JDNEX
JDDRST130-1NEX	Ogranicznik L 13 na wiertło Ø 2.0-3.5 JDNEX
JDDRST150-1NEX	Ogranicznik L 15 na wiertło Ø 2.0-3.5 JDNEX



JDDRST80-2NEX	Ogranicznik L 8 na wiertło Ø 3.75-4.0 JDNEX
JDDRST100-2NEX	Ogranicznik L 10 na wiertło Ø 3.75-4.0 JDNEX
JDDRST115-2NEX	Ogranicznik L 11.5 na wiertło Ø 3.75-4.0 JDNEX
JDDRST130-2NEX	Ogranicznik L 13 na wiertło Ø 3.75-4.0 JDNEX
JDDRST150-2NEX	Ogranicznik L 15 na wiertło Ø 3.75-4.0 JDNEX




JDDRST80-3NEX	Ogranicznik L 8 na wiertło Ø 4.3-5.0 JDNEX
JDDRST100-3NEX	Ogranicznik L 10 na wiertło Ø 4.3-5.0 JDNEX
JDDRST115-3NEX	Ogranicznik L 11.5 na wiertło Ø 4.3-5.0 JDNEX
JDDRST130-3NEX	Ogranicznik L 13 na wiertło Ø 4.3-5.0 JDNEX
JDDRST150-3NEX	Ogranicznik L 15 na wiertło Ø 4.3-5.0 JDNEX



Ograniczniki wiertel znajdują się w kasie chirurgicznej JDNEXKS.

Narzędzia:

JDDREXT	Przedłużka wiertła
NEID	Przenośnik implantu JDNEX
NEIDL	Przenośnik implantu długi JDNEX
NESDPF20	Kłuczyk protetyczny ręczny L 20 JDNEX
NESDPF25	Kłuczyk protetyczny ręczny L 25 JDNEX
NESDPF35	Kłuczyk protetyczny ręczny L 35 JDNEX
JDTW	Klucz dynamometryczny JDTorque
JDTWA	Chirurgiczny adapter do JDTorque

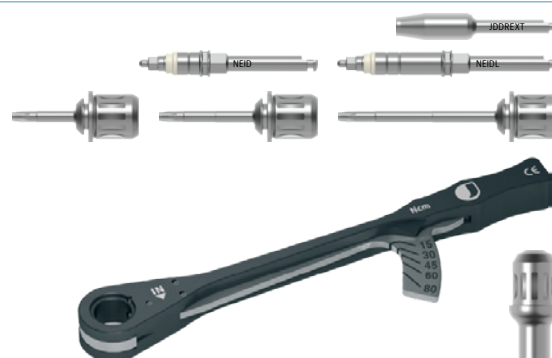

Wskaźniki Kierunku:

JDDI	Wskaźnik kierunku
JDDIS	Wskaźnik kierunku krótki



UPROSZCZONY PROTOKÓŁ WIERCENIA

1

OKREŚL MIEJSCE IMPLANTACJI I GĘSTOŚĆ KOŚCI

Żuchwa / Szczeka

Kość miękka / Kość średniej gęstości / Kość zbita

2


WYBIERZ ŚREDNICĘ IMPLANTU

Ø3.5 / Ø3.75 / Ø4.0 / 4.3 / 5.0 mm

3

WYBIERZ WIERTŁO JD NEX


Wiertła Standardowe, Plus, Countersink

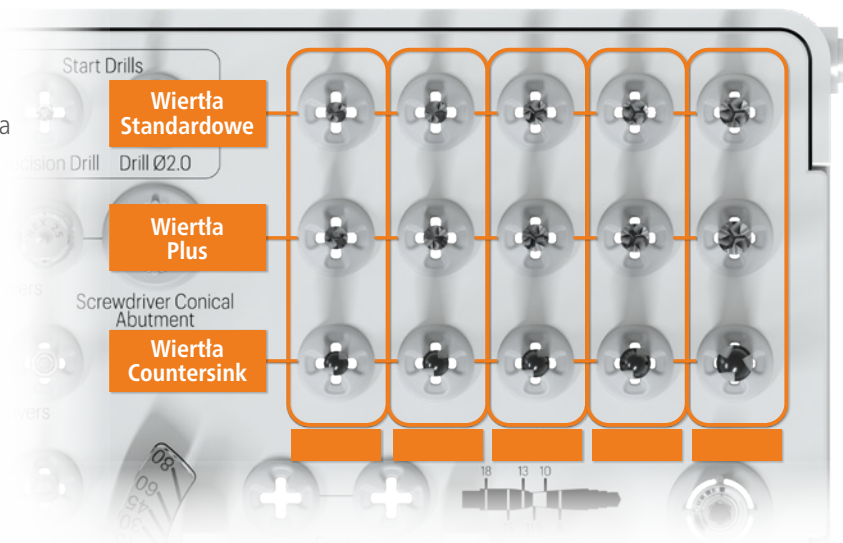

PROTOKÓŁ WIERCENIA

Zaleca się przestrzeganie wskazanej kolejności wiercenia w celu zapewnienia optymalnej stabilizacji pierwotnej implantów.

ŚREDNICA IMPLANTU	MIEKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	KOŚĆ O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
Ø 3,5	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 + Countersink Ø 3.5
Ø 3,75	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 opcjonalnie	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 + Countersink Ø 3.75
Ø 4,0	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 opcjonalnie	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 + Countersink Ø 4.0
Ø 4,3	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 opcjonalnie	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 + Countersink Ø 4.3
Ø 5,0	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 opcjonalnie	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 +	Ø 1.5 wiertło pilotujące Ø 2.0 wiertło pilotujące Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0+ Countersink Ø 5.0

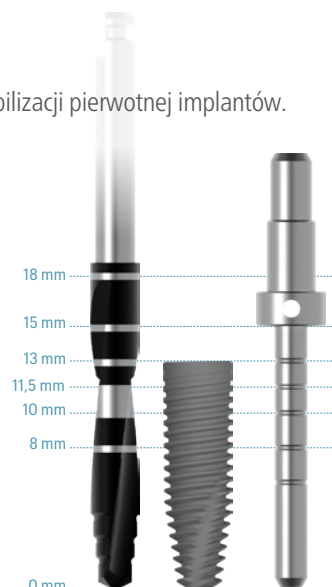

Oznaczenia głębokości wskazują głębokość osadzenia implantu względem poziomu kości.



Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm

JDentalCare, the JDentalCare logo and other trademarks mentioned in this document are, excluding specifically mentioned exceptions, trademarks property of JDentalCare.

The images of the products represented in this brochure are not necessarily to scale.

Note: Not all products manufactured by JDentalCare and represented in this brochure have been regulatory cleared/released for sale in all countries and/or have been licensed in accordance with FDA Rules and Regulations.

For more information about current product assortment and availability, please contact your local JDentalCare distributor. For prescription only.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the other for a licensed dentist.

See instructions for use for more information such as indications, warnings, precaution and contraindications.