




JDENTAL CARE

*just smile*

# JD PTERYGO

*Minimalnie inwazyjne rozwiązanie  
dla zanikowej tylnej części szczęki*

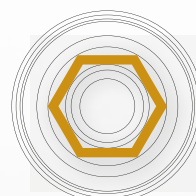

Połączenie heksagonalne



Zaprojektowane dla  
**Maxilla-For-All®**



Made in Italy


## MINIMALNIE INWAZYJNE PODEJŚCIE

Implant JDPterygo Ø 4mm jest wykonany z tytanu klasy 4 i posiada 3,5 mm anodowaną szyjkę implantu.

Został zaprojektowany tak, aby uzyskać optymalną pierwotną stabilizację, zapewniając idealne zakotwiczenie w kości skrzydłowej.

Minimalnie inwazyjne podejście jest możliwe również przy zastosowaniu chirurgii nawigowanej komputerowo.

Ø 4.0mm

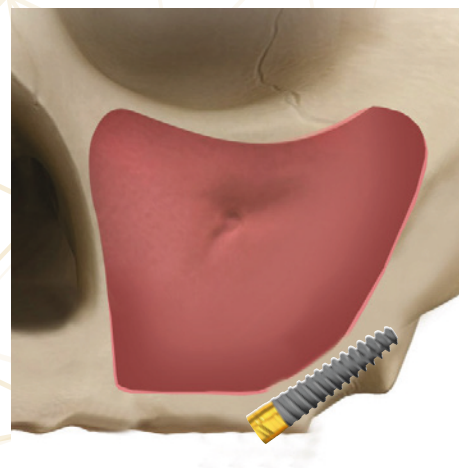

## NOWE ROZWIĄZANIE Ø 3,3mm

DLA EKSTREMALNEJ ATROFII

MNIEJ NIŻ 6mm KOŚCI

Nowy implant JD Pterygo Ø 3,3mm jest wykonany z tytanu klasy 4 i posiada 3,5 mm anodowany kołnierz implantu.

Jest specjalnie zaprojektowany dla przypadków ekstremalnej atrofii, gdy dostępna kość wynosi mniej niż 6 mm pomiędzy tylną ścianą zatoki a guzem szczęki.

Dzięki uproszczonemu protokołowi wiercenia, który obejmuje tylko dwa etapy, łatwo osiągniesz idealne zakotwiczenie w kości skrzydłowej.

Ø 3.3mm



JD PTERYGO ONE

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

Implanty dentystyczne JDPterygo są dostępne w średnicach i długościach przedstawionych w poniższej tabeli:



| ŚREDNICA<br>IMPLANTU | ŚREDNICA<br>WIERZCHOŁKA | DŁUGOŚĆ |    |    |    |
|----------------------|-------------------------|---------|----|----|----|
|                      |                         | 13      | 15 | 18 | 20 |
| Ø 3,3                | 1,75                    |         |    |    |    |
| Ø 4,0                | 2,4                     |         |    |    |    |

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w mm

# KATALOG PRODUKTÓW

## Implanty:

### Ø 3,3

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| PT40130S: | JDPterygo One Ø 3.3 L 13 |
| PT40150S: | JDPterygo One Ø 3.3 L 15 |
| PT40180S: | JDPterygo One Ø 3.3 L 18 |
| PT40200S: | JDPterygo One Ø 3.3 L 20 |

### Ø 4,0

|          |                      |
|----------|----------------------|
| PT40130: | JDPterygo Ø 4.0 L 13 |
| PT40150: | JDPterygo Ø 4.0 L 15 |
| PT40180: | JDPterygo Ø 4.0 L 18 |
| PT40200: | JDPterygo Ø 4.0 L 20 |



## Wiertła do protokołu nieprzewodzonego:

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| JDDRPT20 | Wiertło Ø 2.0 JDPterygo |
| JDDRPT24 | Wiertło Ø 2.4 JDPterygo |
| JDDR101  | Wiertło Ø 2.8 JDPterygo |
| JDDRPT32 | Wiertło Ø 3.2 JDPterygo |



## Wiertła pilotujące do protokołu prowadzonego JDPterygo:

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| JDGD20-130 | Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 13.0 |
| JDGD20-150 | Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 15.0 |
| JDGD20-180 | Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 18.0 |
| JDGD20-200 | Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 20.0 |
| JDGD24-130 | Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 13.0 |
| JDGD24-150 | Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 15.0 |
| JDGD24-180 | Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 18.0 |
| JDGD24-200 | Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 20.0 |



## Narzędzia do implantów i protetyki:

|           |                                                                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| JDID100   | Wkrętak implantologiczny JD - JDPterygo                         | JDPterygo     |
| EVSDPF60: | Wkrętak protetyczny do JDTorque L 60 JDEvolution Plus           |               |
| JDPD105   | Wkrętak protetyczny JDEvolution Plus do narzędzi chirurgicznych |               |
| JDID101   | Wkrętak implantologiczny JD - JDPterygo One                     | JDPterygo One |
| EVSDPF60  | Wkrętak protetyczny do JDTorque L 60                            |               |
| JDPD103   | Wkrętak protetyczny do narzędzi chirurgicznych                  |               |



## Retraktor JDPterygo:

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 1005-14 | Retraktor JDPterygo |
|---------|---------------------|



## Kasety chirurgiczne JD Pterygo:

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| JDKIT01 | Kaseta chirurgiczna JD – zestaw wiertel JDPterygo                          |
| JDKIT02 | Kaseta JD do chirurgii nawigowanej – dodatkowe wiertła (JDNasal+JDPterygo) |
| JDKIT04 | Kaseta chirurgiczna JD – zestaw JDPterygo                                  |

## Rozwiązania protetyczne:

Połączenie JDPterygo Ø 3.3 mm jest kompatybilne z JDEvolution S, dlatego prosimy o zapoznanie się z katalogiem JDEvolution S w celu wyboru najbardziej odpowiedniego komponentu.


Połączenie JDPterygo Ø 4 mm jest kompatybilne z JDEvolution Plus, dlatego prosimy o zapoznanie się z katalogiem JDEvolution Plus w celu wyboru najbardziej odpowiedniego komponentu.

# PROTOKÓŁ IMPLANTACJI


Przygotowanie miejsca wszczepienia implantu JDPterygo może być przeprowadzone zgodnie z protokołem chirurgicznym nieprowadzonym lub prowadzonym komputerowo. Zaleca się przestrzeganie wskazań dotyczących protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu.

## JDPTERYGO Ø 3.3 mm

### • Przygotowanie miejsca - protokół bez nawigacji

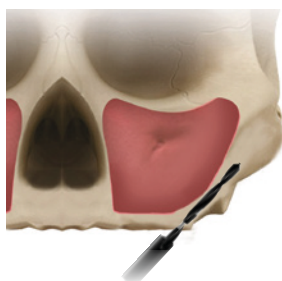

**1.** Rozpocznij osteotomię przy użyciu wiertła JDPterygo Ø 2.0 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony.

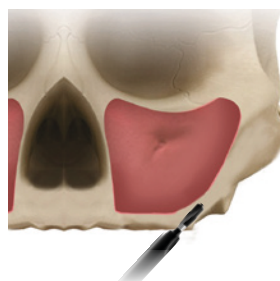

**2.** Zakończ osteotomię wiertłem JDPterygo Ø 2.8 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.

### • Przygotowanie miejsca - protokół prowadzony komputerowo




**1.** Rozpocznij osteotomię przy użyciu wiertła prowadzącego Ø 2.0 mm na taką samą długość, jak długość implantu.


**2.** Zakończ osteotomię wiertłem prowadzącym Ø 2.8 mm na głębokość 6 mm.

## JDPTERYGO Ø 4.0 mm


### • Protokół chirurgiczny - bez nawigacji

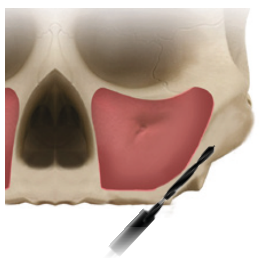

**1.** Rozpocznij osteotomię przy użyciu wiertła JDPterygo Ø 2.0 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony.

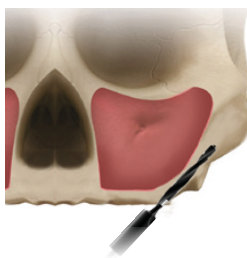

**2.** Kontynuuj przy użyciu wiertła JDPterygo Ø 2.4 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony.

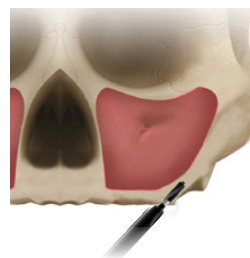

**3.** Zakończ osteotomię wiertłem JDPterygo Ø 3.2 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.

### • Protokół chirurgiczny - implantacja nawigowana



**1.** Rozpocznij osteotomię przy użyciu pierwszego wiertła prowadzącego JDGD24-060 Ø 2.4 x L 6 mm\*.

**2.** Kontynuuj przy użyciu wiertła prowadzącego Ø 2.4 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony (do wyboru wiertła prowadzące o długości L 13-15-18-20 mm).

**3.** Kontynuuj przy użyciu wiertła prowadzącego Ø 2.8 mm na głębokość 8 mm\*. Zakończ osteotomię wiertłem prowadzącym Ø 3.2 mm na głębokość 6 mm\*.

\*Oznaczone wiertła nie zostały uwzględnione w tej broszurze. Prosimy o zapoznanie się z broszurą JD Guided Surgery Kit, dostępną na stronie [www.jdentalcare.com](http://www.jdentalcare.com).

# KASETY CHIRURGICZNE JD PTERYGO

Przygotowanie miejsca wszczepienia implantu JDPterygo może być przeprowadzone zgodnie z protokołem chirurgicznym nawigacyjnym lub bez. Zaleca się przestrzeganie wskazań dotyczących poniższej protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilność implantu.



## Kaseta chirurgiczna JD

Zestaw wiertel JDPterygo składa się z czterech dłuższych wiertel z dwoma znacznikami laserowymi, idealnych do pracy w tylnej części szczęki.



## Kaseta chirurgiczna JD

Zestaw JDPterygo zawiera cztery dłuższe wiertła, dwa wkręta i dwa wkręta implantologiczne.

JDentalCare

Logo JDentalCare oraz inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie, z wyjątkiem szczególnie wymienionych wyjątków, są własnością JDentalCare.

Przedstawione w tej broszurze obrazy produktów niekoniecznie są w skali rzeczywistej.

Uwaga: Nie wszystkie produkty wytwarzane przez JDentalCare i przedstawione w tej broszurze zostały zatwierdzone/regulacyjnie dopuszczone do sprzedaży we wszystkich krajach i/lub posiadają licencję zgodnie z przepisami FDA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnego asortymentu produktów i ich dostępności, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem JDentalCare. Tylko na receptę.

Ostrzeżenie: Federalne prawo USA ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie do licencjonowanych dentystów lub za ich zgodą.

Zapoznaj się z instrukcją użytkowania, aby uzyskać więcej informacji, takich jak wskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania.

REV.13 of 2024-12-09