




JDENTALCARE

just smile

JD ZYGOMA

*Rozwiązanie bez przeszczepu dla ciężkiej
resorpcji w kości szczękowej*

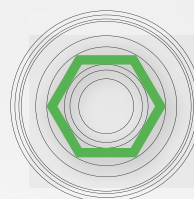

Połączenie heksagonalne



Zaprojektowane dla
Maxilla-For-All®



Made in Italy

ROZWIĄZANIE BEZ KONIECZNOŚCI REGENERACJI KOŚCI

+ Tytan klasy 4

+ Wysoka pierwotna stabilność do natychmiastowej funkcji

Dzięki konstrukcji system ten umożliwia zaopatrzenie pacjenta w uzupełnienie tymczasowe bezpośrednio po zabiegu implantacji. Multikortykalne zakotwiczenie oraz unikatowy kształt wierzchołka implantu o średnicy 2,0 mm zapewniają doskonałą stabilizację pierwotną wszczepów.

+ Dostępne są dwie opcjonalne średnice: 3,9 mm i 4,3 mm

Uzyskaj stabilność nawet w przypadkach rehabilitacji pacjentów dotkniętych zaawansowaną resorpcją podłoża protetycznego, u których standardowa procedura rekonstrukcji uzębienia wymagałaby przeprowadzenia przeszczepu tkanki kostnej.

+ Większa swoboda wyboru procedur chirurgicznych i protetycznych

Poznaj i wykorzystaj zalety implantów o prostej i wypolerowanej szyjce, długościach od 30 do 60mm i kompatybilnym z systemem JDEvolution Plus+ połączeniu wewnętrznym w kształcie heksagonu. Wysoka stabilizacja pierwotna umożliwiającą natychmiastowe obciążenie.

Implant Ø 3,9mm

Implant Ø 4,3mm

Ø 3,9mm


Ø 4,3mm

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Implanty dentystyczne JDZygoma są dostępne w średnicach i długościach przedstawionych w poniższej tabeli:

ŚREDNICA KORONALNA	ŚREDNICA IMPLANTU	ŚREDNICA WIERZCHOŁKOWA	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI GWINTOWANEJ	DŁUGOŚĆ IMPLANTU
Ø 4,3	Ø 3,9	2,70	18,0	30
				35
				37.5
				40
				42.5
				45
				47.5
				50
				52.5
				55
Ø 4,5	Ø 4,3	2,14	18,0	57.5
				30
				35
				37.5
				40
				42.5
				45
				47.5
				50
				52.5
				55
				57.5
				60

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w mm

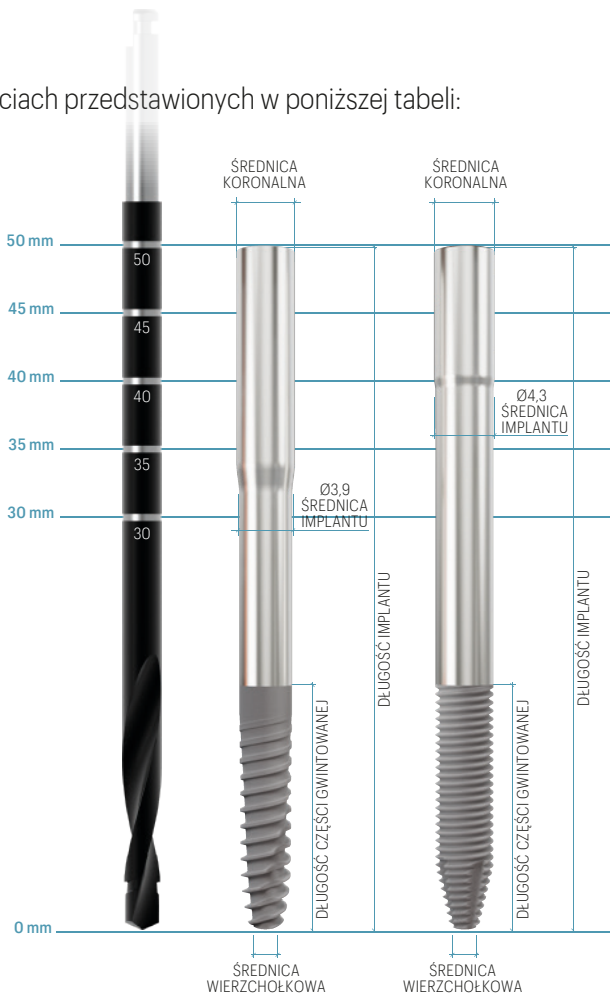

KATALOG PRODUKTÓW


Implanty:

Ø 3,9

- ZY39300: JDZygoma Ø 3.9 L 30
- ZY39325: JDZygoma Ø 3.9 L 32.5
- ZY39350: JDZygoma Ø 3.9 L 35
- ZY39375: JDZygoma Ø 3.9 L 37.5
- ZY39400: JDZygoma Ø 3.9 L 40
- ZY39425: JDZygoma Ø 3.9 L 42.5
- ZY39450: JDZygoma Ø 3.9 L 45
- ZY39475: JDZygoma Ø 3.9 L 47.5
- ZY39500: JDZygoma Ø 3.9 L 50
- ZY39525: JDZygoma Ø 3.9 L 52.5
- ZY39550: JDZygoma Ø 3.9 L 55
- ZY39575: JDZygoma Ø 3.9 L 57.5
- ZY39600: JDZygoma Ø 3.9 L 60


Ø 4,3

- ZY43300: JDZygoma Ø 4.3 L 30
- ZY43350: JDZygoma Ø 4.3 L 35
- ZY43375: JDZygoma Ø 4.3 L 37.5
- ZY43400: JDZygoma Ø 4.3 L 40
- ZY43425: JDZygoma Ø 4.3 L 42.5
- ZY43450: JDZygoma Ø 4.3 L 45
- ZY43475: JDZygoma Ø 4.3 L 47.5
- ZY43500: JDZygoma Ø 4.3 L 50
- ZY43525: JDZygoma Ø 4.3 L 52.5
- ZY43550: JDZygoma Ø 4.3 L 55
- ZY43575: JDZygoma Ø 4.3 L 57.5
- ZY43600: JDZygoma Ø 4.3 L 60

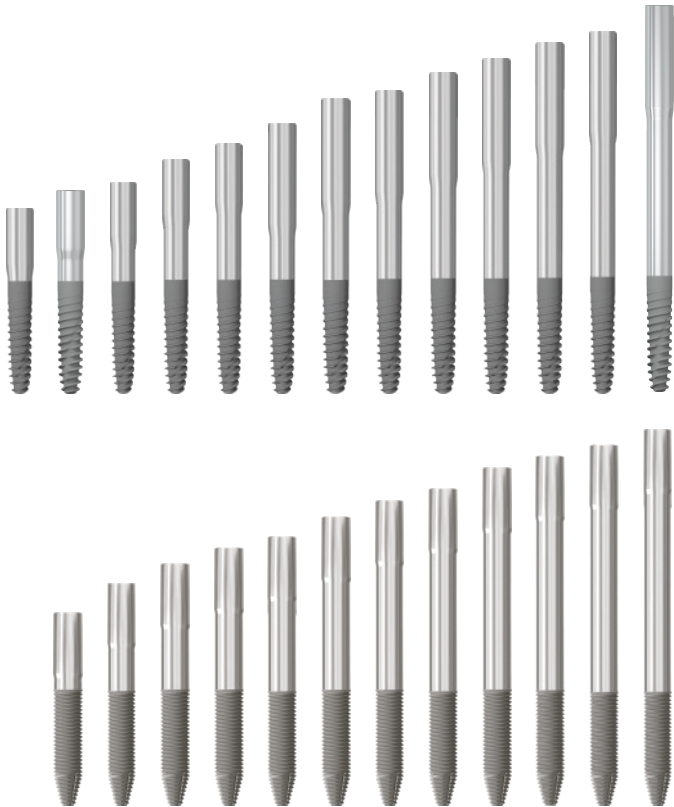

Wiertła i sonda głębokości:

JDDRZSF28	Wiertło okrągłe Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDRID50	Wiertło pilotujące L 50 JDZygoma
ZJDDREXS150NP	Wiertło pilotujące L 50 Nowy Profil JDZygoma
ZJDDREXS170NP	Wiertło pilotujące L 70 Nowy Profil JDZygoma
JDDIADR	Wiertło diamentowe JDZygoma
JDDIADRL	Długie wiertło diamentowe JDZygoma
JDZYADR	JDZygoArch Drill
ZJDDR28	Wiertło Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR28L	Długie wiertło Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR32	Wiertło Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR32L	Długie wiertło Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR36	Wiertło Ø 3.6 JDZygoma
ZJDDR36L	Długie wiertło Ø 3.6 JDZygoma
ZJDDREXS150N	Wiertło zygomatyczne 1 L 50 - 3 rowki
ZJDDREXS170N	Wiertło zygomatyczne 1 L 70 - 3 rowki
ZJDDREXS250N	Wiertło zygomatyczne 2 L 50 - 3 rowki
ZJDDREXS270N	Wiertło zygomatyczne 2 L 70 - 3 rowki
ZJDDREXS350N	Wiertło zygomatyczne 3 L 50 - 3 rowki
ZJDDREXS370N	Wiertło zygomatyczne 3 L 70 - 3 rowki
JDZPR	Sonda głębokości 60 mm JDZygoma

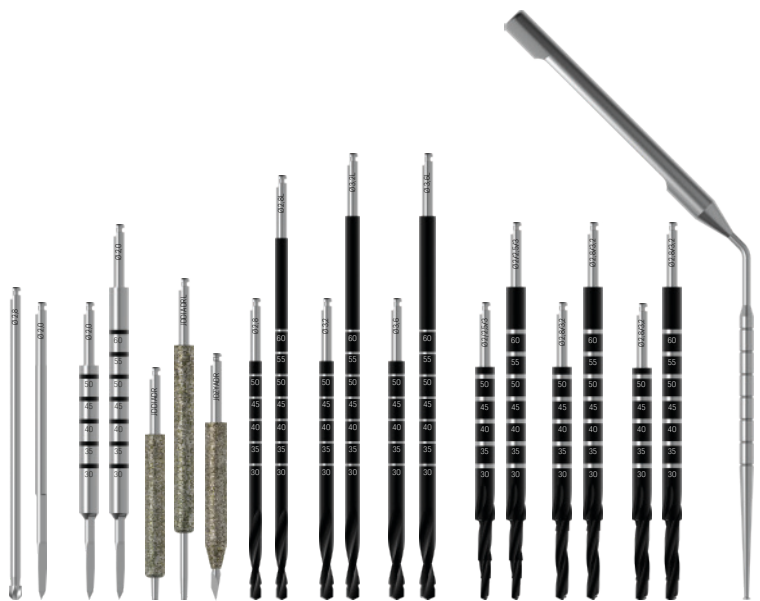

Protetyka i narzędzia Zygoma

Łącznik typu Multi-unit:

EVCA4545C:	Łącznik typu Multi-unit 45° H 4.5 JDEvolution Plus
EVCA4560C:	Łącznik typu Multi-unit 45° H 6.0 JDEvolution Plus
EVCA5250C:	Łącznik typu Multi-unit kątowy 52.5° H 5.0 JDEvolution Plus
EVCA6050C:	Łącznik typu Multi-unit kątowy 60° H 5.0 JDEvolution Plus
EVCASA60:	Śruba do typu Multi-unit kąтового 60° JDEvolution Plus



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



JDScanBody, interfejs i analog łącznika CAD CAM do łącznika typu Multi-unit:

EVCAARC	Analog łącznika typu Multi-unit CAD CAM
---------	---



Wkrętaki do implantów i protez:

EVSUDMAX	Wkrętak chirurgiczny MAX
----------	--------------------------



Kasety chirurgiczne JD Zygoma:

ZSKITE	Kaseta chirurgiczna JDZygoma Extra
ZSKITF	Kaseta chirurgiczna JDZygoma Full


Rozwiązania protetyczne:

Połączenie JDZygoma jest kompatybilne z linią implantów JDEvolution Plus, dlatego prosimy o zapoznanie się z katalogiem JDEvolution Plus w celu wyboru najbardziej odpowiedniego komponentu.


PROTOKÓŁ PREPARACJI MIEJSCA

Dla przygotowania miejsca wszczępienia implantów JDZygoma zaleca się przestrzeganie poniższych sekwencji wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilność implantów.

JDZygoma Ø 3.9mm

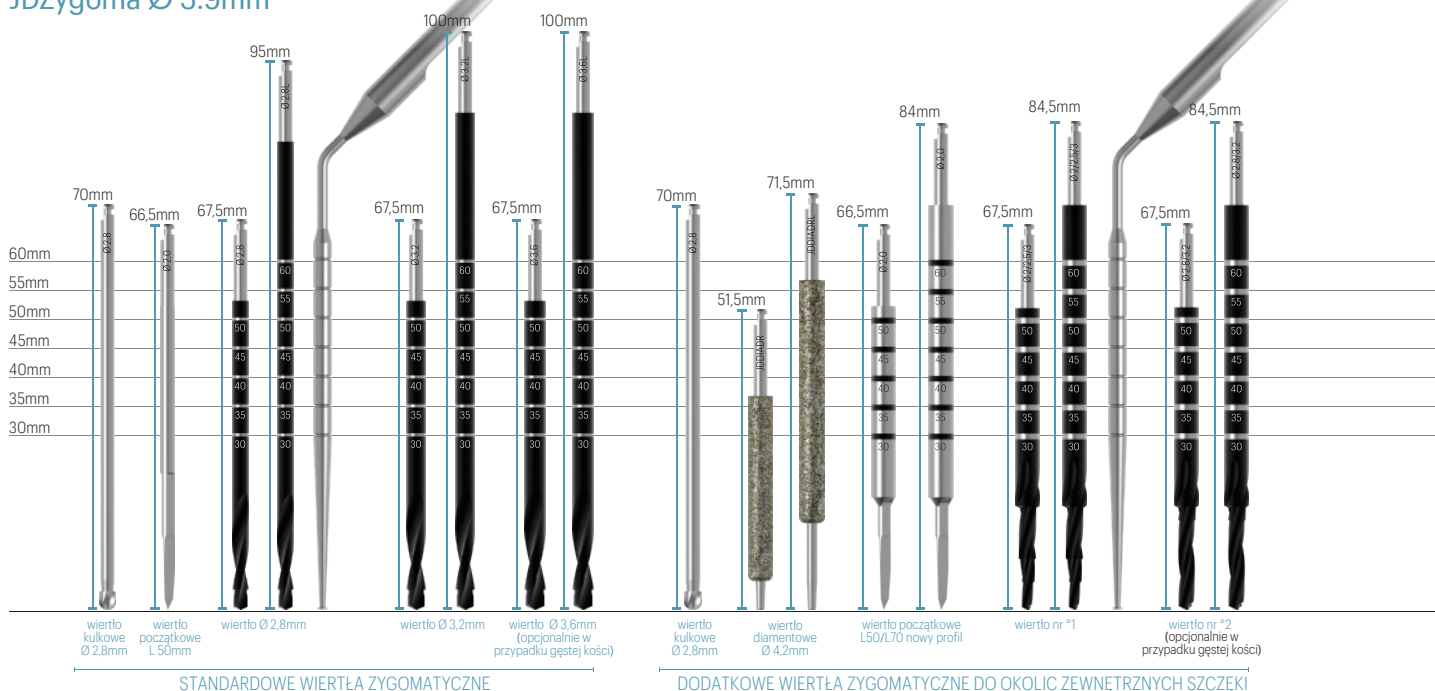

JDZygoma Ø 4.3mm

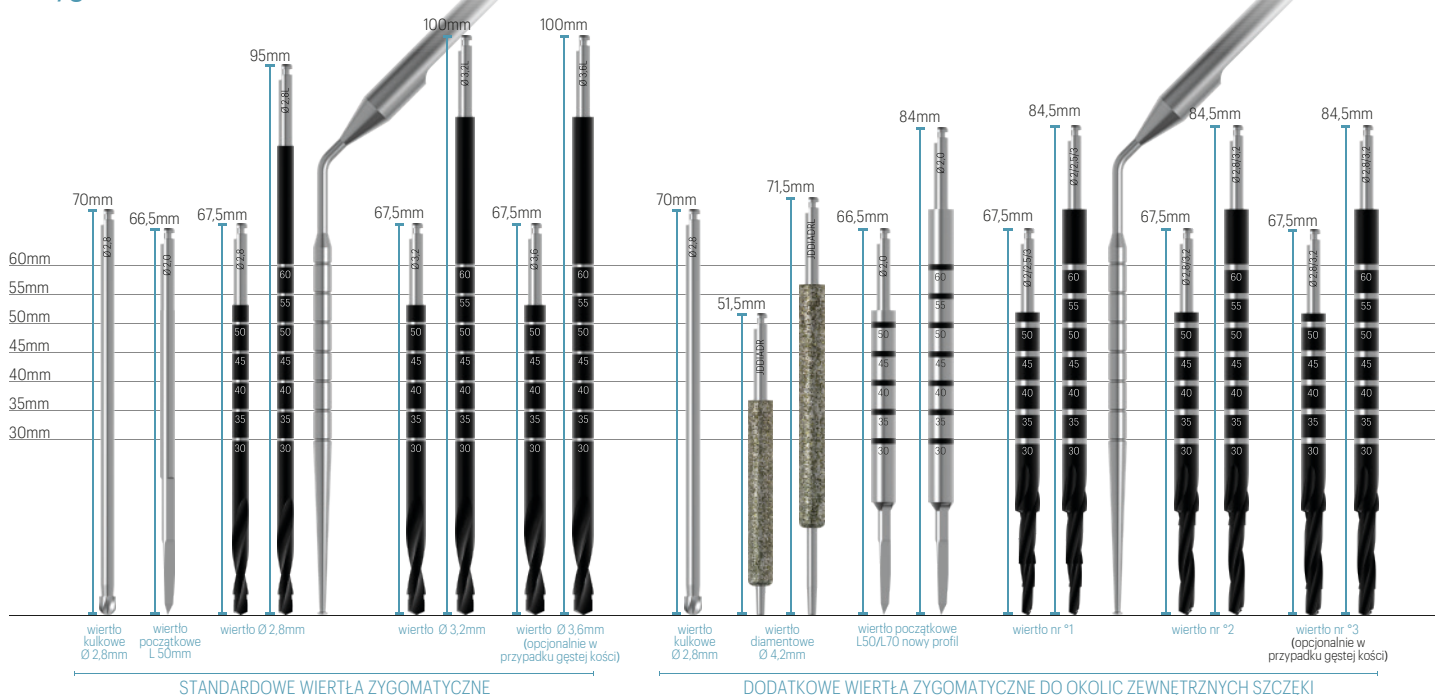

JDentalCare, logo JDentalCare i inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie, z wyjątkiem specjalnie wymienionych wyjątków, są własnością JDentalCare.

Obrazy produktów przedstawione w tej broszurze niekoniecznie są w skali.

Uwaga: Nie wszystkie produkty wyprodukowane przez JDentalCare i przedstawione w tej broszurze zostały zatwierdzone/regulowane do sprzedaży we wszystkich krajach lub zostały licencjonowane zgodnie z przepisami FDA.

W celu uzyskania informacji o aktualnym asortymencie produktów i dostępności, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem JDentalCare. Tylko na receptę.

Ostrzeżenie: Prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie licencjonowanym dentystom.

Zobacz instrukcję użytkowania, aby uzyskać więcej informacji, takich jak wskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania.

REV.21 of 2024-10-16

Protetyka linii JDEvolution Plus

Śruba zamykająca:

EVCS:	Śruba zamykająca JDEvolution Plus
EVCS6:	Śruba zamykająca Ø 6,0 JDEvolution Plus

Śruba gojąca:


EVHA41:	Śruba gojąca Ø 4.0 H 1.0 JDEvolution plus
EVHA42:	Śruba gojąca Ø 4.0 H 2.0 JDEvolution plus
EVHA43:	Śruba gojąca Ø 4,0 H 3,0 JDEvolution Plus
EVHA45:	Śruba gojąca Ø 4,0 H 5,0 JDEvolution Plus
EVHA47:	Śruba gojąca Ø 4,0 H 7,0 JDEvolution Plus
EVHA53:	Śruba gojąca Ø 5,0 H 3,0 JDEvolution Plus
EVHA55:	Śruba gojąca Ø 5,0 H 5,0 JDEvolution Plus
EVHA57:	Śruba gojąca Ø 5,0 H 7,0 JDEvolution Plus
EVHA59:	Śruba gojąca Ø 5,0 H 9,0 JDEvolution Plus
EVHA63:	Śruba gojąca Ø 6,0 H 3,0 JDEvolution Plus
EVHA65:	Śruba gojąca Ø 6,0 H 5,0 JDEvolution Plus
EVHA67:	Śruba gojąca Ø 6,0 H 7,0 JDEvolution Plus
EVHA753:	Śruba gojąca Ø 7,5 H 3,0 JDEvolution Plus
EVHA755:	Śruba gojąca Ø 7,5 H 5,0 JDEvolution Plus
EVHA54TS:	Śruba gojąca do tkanek miękkich Ø 5,0 H 4,0 JDEvolution Plus
EVHA56TS:	Śruba gojąca do tkanek miękkich Ø 5,0 H 6,0 JDEvolution Plus



Transfer wyciskowy:

ŁYŻKA OTWARTA

EVICOT4C:	Transfer wyciskowy łyżka otwarta Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVICOT5C:	Transfer wyciskowy łyżka otwarta Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVICOT6C:	Transfer wyciskowy łyżka otwarta Ø 6.0 JDEvolution Plus
EVICOTNEC:	Transfer łyżka otwarta dla mostu
EVICOTS:	Śruba do transferu wyciskowego z łyżką otwartą JDEvolution Plus
EVICOT5TSC:	Transfer wyciskowy do tkanek miękkich łyżka otwarta Ø 5.0

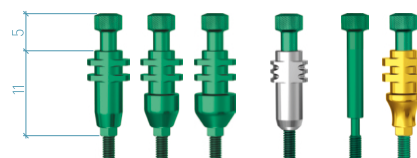

ŁYŻKA ZAMKNIĘTA


EVICCT4C:	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVICCT5C:	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVICCT6C:	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Ø 6.0 JDEvolution Plus
EVICCTS:	Śruba do transferu wyciskowego z łyżką zamkniętą JDEvolution Plus
EVICCTIC:	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Direct Press Fit JDEvolution Plus



Łącznik tymczasowy:


EVTAE:	Łącznik tymczasowy z hexem JDEvolution Plus
EVTAEPC:	Łącznik tymczasowy z hexem Peek JDEvolution Plus
EVTANEC:	Łącznik tymczasowy bez hexa JDEvolution Plus
EVTATESC:	Łącznik tymczasowy typu Multi-unit do tkanek miękkich z hexem JDEvolution Plus
EVTANETSC:	Łącznik tymczasowy typu Multi-unit do tkanek miękkich bez hexa JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

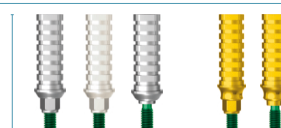


Łącznik prosty:

EVNSA4510C:	Łącznik prosty Ø 4.5 H 1.5 JDEvolution Plus
EVNSA4520C:	Łącznik prosty Ø 4.5 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA4540C:	Łącznik prosty Ø 4.5 H 4.0 JDEvolution Plus
EVNSA5020C:	Łącznik prosty Ø 5.0 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA5040C:	Łącznik prosty Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus
EVNSA6020C:	Łącznik prosty Ø 6.0 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA6040C:	Łącznik prosty Ø 6.0 H 4.0 JDEvolution Plus
EVNSA5020TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich Ø 5.0 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA5040TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus

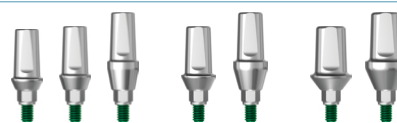

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

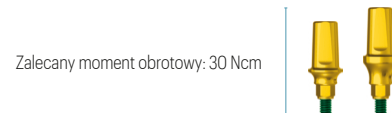

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik GP:

EV15GPAEC:	Łącznik GP 15° JDEvolution Plus
EV25GPAEC:	Łącznik GP 25° JDEvolution Plus
EVGPA40EC:	Łącznik GP z hexem Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVGPA40NEC:	Łącznik GP bez hexa Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVGPAEC:	Łącznik GP z hexem Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVGPA50NEC:	Łącznik GP bez hexa Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVGPAEPC:	Łącznik GP z hexem Peek Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVGPA60EC:	Łącznik GP z hexem Ø 6.0 JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Łącznik anatomiczny:

EVEA15:	Łącznik anatomiczny H 1.5 JDEvolution Plus
EVEA30:	Łącznik anatomiczny H 3.0 JDEvolution Plus
EV15A15:	Łącznik anatomiczny kątowny 15° Ø 5.0 H 1.5
EV15A15N:	Łącznik anatomiczny kątowny 15° Ø 4.5 H 1.5
EV15A30:	Łącznik anatomiczny kątowny 15° Ø 5.0 H 3.0
EV15A30N:	Łącznik anatomiczny kątowny 15° Ø 4.5 H 3.0
EV25A15:	Łącznik anatomiczny kątowny 25° Ø 5.0 H 1.5
EV25A30:	Łącznik anatomiczny kątowny 25° Ø 5.0 H 3.0

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik Rapid:

EVRA15C:	Łącznik Rapid H 1.5 JDEvolution Plus
EVRA30C:	Łącznik Rapid H 3.0 JDEvolution Plus
EVRA15D:	Łącznik Rapid bez czapeczki gojącej i transferu H 1.5 JDEvolution Plus
EVRA30D:	Łącznik Rapid bez czapeczki gojącej i transferu H 3.0 JDEvolution Plus
EVRAHC	Czapeczka gojąca do łącznika Rapid
EVRAIC	Transfer wyciskowy do łącznika Rapid
EVRAAR	Analog łącznika Rapid

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik Wax-up

EVWAEC:	Wax-up łącznik aktywny
EVWANEC:	Wax-up łącznik pasywny

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik kobaltowo-chromowy:

EVCCEC:	Łącznik kobaltowo-chromowy aktywny JDEvolution Plus
EVCCNEC:	Łącznik kobaltowo-chromowy pasywny JDEvolution Plus
EVCACCNEC:	Łącznik kobaltowo-chromowy typu Multi-unit pasywny JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

15 Ncm

Łącznik złote:

EVGAEC:	Łącznik złoty aktywny JDEvolution Plus
EVGANEC:	Łącznik złoty pasywny JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik typu Multi-unit:

EVNCA10C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 1.0 JDEvolution Plus
EVNCA15C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 1.5 JDEvolution Plus
EVNCA20C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 2.0 JDEvolution Plus
EVNCA30C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 3.0 JDEvolution Plus
EVNCA40C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 4.0 JDEvolution Plus
EVNCA70C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 7.0 JDEvolution Plus
EVNCA90C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 9.0 JDEvolution Plus
EVNCA15TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich H 1.5 JDEvolution Plus
EVNCA30TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich H 3.0 JDEvolution Plus
EVNCA40TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich H 4.0 JDEvolution Plus
EVNCA50TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich H 5.0 JDEvolution Plus
EVCA1725C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny 17° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA1735C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny 17° H 3.5 JDEvolution Plus
EVCA3025C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny 30° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA3035C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny 30° H 3.5 JDEvolution Plus
EVCA1725TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 17° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA1735TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 17° H 3.5 JDEvolution Plus
EVA275C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 17° H 5.0 JDEvolution Plus
EVCA3025TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 30° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA3035TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 30° H 3.5 JDEvolution Plus
EVCA3050TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 30° H 5.0 JDEvolution Plus
EVA137C:	Łącznik prosty typu Multi-unit aktywny H 1.5 JDEvolution Plus
EVA138C:	Łącznik prosty typu Multi-unit aktywny H 3.0 JDEvolution Plus
EVS105:	Śruba do łącznika prostego typu Multi-unit aktywnego H 1.5 JDEvolution Plus
EVS106:	Śruba do łącznika prostego typu Multi-unit aktywnego H 3 JDEvolution Plus
EVCASA:	Śruba do łącznika typu Multi-unit kątownego JDEvolution Plus
EVCAPS:	Śruba protetyczna do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAPSL:	Długa śruba protetyczna do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAPSA:	Śruba protetyczna kątowna do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTEC:	Transfer wyciskowy aktywny otwarta łyżka do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTC:	Transfer wyciskowy otwarta łyżka do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTLC:	Transfer wyciskowy otwarta łyżka długi do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTO2:	Śruba do transferu wyciskowego otwarta łyżka do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTO4:	Śruba do transferu wyciskowego otwarta łyżka długi do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICCTC:	Transfer wyciskowy zamknięta łyżka dla łącznika typu Multi-unit

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm


Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm

EVCAHC:	Czapka gojąca dla łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAHCL:	Czapka gojąca H 6.0 do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAHC9:	Czapka gojąca H 9.0 do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAHCB:	Czapka gojąca Peek do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAGPAEC:	Łącznik GP aktywny do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAGPANEC:	Łącznik GP pasywny do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCATANEWSC:	Łącznik tymczasowy bez hexa do gładkiego spawania do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCATANEC:	Łącznik tymczasowy bez hexa do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCATANEWC:	Łącznik tymczasowy bez hexa dla spawania do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAWANEC:	Wax-Up łącznik pasywny dla łącznika stożkowego JDEvolution Plus

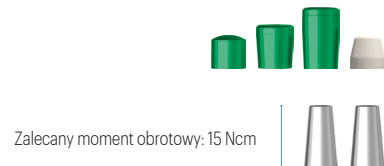

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm

Śruba protetyczna

EVS:	Śruba protetyczna
EVSA:	Śruba protetyczna kątowna

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Interfejs

EVINTEC:	Interfejs z hexem JDEvolution Plus
EVINTNEC:	Interfejs bez hexa JDEvolution Plus
70287C:	Interfejs bez hexa do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm




15 Ncm

Łącznik AS


EVASCEC:	Łącznik AS z hexem JDEvolution Plus
EVASNEC:	Łącznik AS bez hexa JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

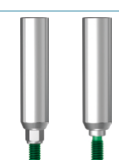

TiBase, JDScanBody i analog laboratoryjny Implantu CAD CAM:

EVSBCEC:	ScanBody aktywny JDEvolution Plus
EVCASBCEC:	ScanBody do łącznika typu Multi-unit JDEvolution
EVCASBCEEC:	ScanBody aktywny do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCASBCEC:	On Top ScanBody do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
JDSCGIOS	ScanBody Full Arch Tracer
JDSCGIOSE	ScanBody Full Arch Tracer Hexagonal
JDSCGIOSR	Scan Body Rectangular Full Arch Tracer

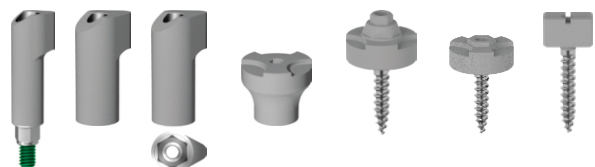

EVHSB53:	On Top ScanBody z hexem Ø 5.0 H 3.0 JDEvolution Plus
EVHSB55:	On Top ScanBody z hexem Ø 5.0 H 5.0 JDEvolution Plus
EVHSB57:	On Top ScanBody z hexem Ø 5.0 H 7.0 JDEvolution Plus
EVSCPC:	ScanPost JDEvolution Plus



EVTIBC:	TiBase z hexem Ø 4.25 H 0.5 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIBNEC:	TiBase bez hexa Ø 4.25 H 0.5 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIB15C:	TiBase z hexem Ø 4.25 H 1.5 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIB15NEC:	TiBase bez hexa długości Ø 4.25 H 1.5 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIB30C:	TiBase z hexem Ø 4.25 H 3.0 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIB30NEC:	TiBase bez hexa długości Ø 4.25 H 3.0 C 4.7 JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



EVTIBNC:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 0.5 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIBNENC:	TiBase bez hexa długości H 0.5 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIB15NC:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 1.5 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIB15NENC:	TiBase bez hexa długości Ø 4.4 H 1.5 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIB30NC:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 3.0 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIB30NENC:	TiBase bez hexa długości Ø 4.4 H 3.0 C 7.7 JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



EVA150C:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 0.5 C 7.7 do kanału kątownego
EVA151C:	TiBase bez hexa nowy Ø 4.4 H 0.5 C 7.7 do kanału kątownego
EVA152C:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 1.5 C 7.7 do kanału kątownego
EVA153C:	TiBase bez hexa nowy Ø 4.4 H 1.5 C 7.7 do kanału kątownego
EVA154C:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 3.0 C 7.7 do kanału kątownego
EVA155C:	TiBase bez hexa nowy Ø 4.4 H 3.0 C 7.7 do kanału kątownego

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



EVA133C:	Interfejs TiBase z hexem H 6.0 do kanału kątownego JDEvolution Plus
EVA134C:	Interfejs TiBase bez hexa H 6.0 do kanału kątownego JDEvolution Plus
EVA135C:	Interfejs TiBase z hexem H 10.0 do kanału kątownego JDEvolution Plus
EVA136C:	Interfejs TiBase bez hexa H 10.0 do kanału kątownego JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



EVCAITEC:	Interfejs CAD CAM z hexem do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus (H 7.5)
EVA139C:	TiBase z hexem do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus (H 5.0)
EVCAITC:	Interfejs CAD CAM bez hexa do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus (H 7.3)
EVCATIBC:	TiBase do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus (H 5.0)

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm



EVS110	Śruba protetyczna dla łącznika typu Multi-unit bezpośrednia
EVS111	Śruba protetyczna dla łącznika typu Multi-unit bezpośrednia długa
EVS112	Śruba protetyczna dla kąтового kanału łącznika typu Multi-unit bezpośrednia
EVANCN:	Analog implantu CAD CAM JDEvolution Plus Nowy
EVCAARCN	Analog łącznika typu Multi-unit CAD CAM Nowy
EVPMNC:	Przedfrezowany blok łącznika JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Łącznik Konometryczny:

EVCP05C:	Łącznik konometryczny prosty H 0.5 JDEvolution Plus
EVCP10C:	Łącznik konometryczny prosty H 1.0 JDEvolution Plus
EVCP20C:	Łącznik konometryczny prosty H 2.0 JDEvolution Plus
EVCP30C:	Łącznik konometryczny prosty H 3.0 JDEvolution Plus
EVCP40C:	Łącznik konometryczny prosty H 4.0 JDEvolution Plus
EV7CP20C:	Łącznik konometryczny kątowy 7,5° H 2.0 JDEvolution Plus
EV15CP20C:	Łącznik konometryczny kątowy 15° H 2.0 JDEvolution Plus
EV22CP20C:	Łącznik konometryczny kątowy 22.5° H 2.0 JDEvolution Plus
EVA300C:	Łącznik konometryczny kątowy 30° H 2.0 JDEvolution Plus
EVA285C:	Łącznik konometryczny kątowy 7,5° H 3.0 JDEvolution Plus
EVA286C:	Łącznik konometryczny kątowy 15° H 3.0 JDEvolution Plus
EVA287C:	Łącznik konometryczny kątowy 22,5° H 3.0 JDEvolution Plus
EVA288C:	Łącznik konometryczny kątowy 30° H 3.0 JDEvolution Plus
EVCPS:	Śruba do łącznika konometrycznego JDEvolution Plus
EVA130C:	Nasadka z bolcem do spawania wewnątrzustnego
EVA131C:	Nasadka do protez częściowych lub pełnołukowych stałych
EVA132C:	Nasadka antyrotacyjna do pojedynczego elementu
EVCPIC	Transfer wyciskowy PEEK dla łącznika konometrycznego
EVCPAN	Analog łącznika konometrycznego

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm




Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm




Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

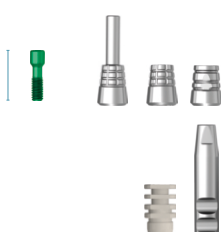

Łącznik Kulowy:

EVBA15:	Łącznik kulowy H 1.5 JDEvolution Plus
EVBA30:	Łącznik kulowy H 3.0 JDEvolution Plus
EVBA50:	Łącznik kulowy H 5.0 JDEvolution Plus
EVBAA	Analog łącznika kulowego
EVBAHC	Nasadka elastyczna z pojemnikiem dla łącznika kulowego
EVBAN	Nasadka retencyjna dla łącznika kulowego

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

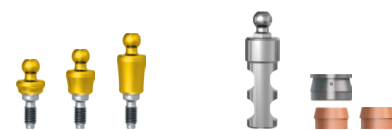

Łącznik Emi:

EVEMI15:	Łącznik Emi H 1.5 JDEvolution Plus
EVEMI30:	Łącznik Emi H 3.0 JDEvolution Plus
EVEMI50:	Łącznik Emi H 5.0 JDEvolution Plus
EVEMISCK	Smart Cap Attachment dla łącznika Emi
EVEMIHC	Nasadka elastyczna z pojemnikiem dla łącznika Emi
EVEMIN	Nasadka elastyczna retencyjna (1.2 kg) dla łącznika Emi
EVEMIH	Pojemnik na nasadki Emi
EVEMIIC	Transfer wyciskowy plastikowy dla łącznika Emi
EVEMIICS	Transfer wyciskowy stalowy dla łącznika Emi
EVEMINT	Biała nasadka retencyjna (1.8 kg) dla łącznika Emi
EVEMINY	Żółta nasadka retencyjna (0.6 kg) dla łącznika Emi
EVEMINP	Fioletowa nasadka retencyjna (2.5 kg) dla łącznika Emi
EVEMINB	Nasadka retencyjna laboratoryjna dla łącznika Emi
EVEMIEIT	Narzędzie do wyjmowania i wstawiania nasadek
EVEMIA	Analog łącznika Emi

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Analog implantu:

EVAN:	Analog implantu JDEvolution Plus
-------	----------------------------------



Bone Mill (Profiler):

JDBMNC:	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDEvolution Plus
JDBM6NC:	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDEvolution Plus
JDBMGNN:	Bone Mill Guide JDEvolution Plus



Wiertła krótkie:

JDDICS4	Wiertło krótkie Ø 4mm L 6 JDIcon Plus
JDDICS4D	Wiertło krótkie Ø 4mm L 6 do gęstej kości JDIcon Plus
JDDICS5	Wiertło krótkie Ø 5mm L 6 JDIcon Plus



Narzędzia do implantów i protetyki:

EVID:	Wkrętak implantologiczny JDEvolution Plus
EVIDL:	Wkrętak implantologiczny długi JDEvolution Plus
JDID127	Wskaźnik głębokości implantu JDEvolution Plus
EVSDPF15:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 15 JDEvolution Plus
EVSDPF20:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 20 JDEvolution Plus
EVSDPF25:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 25 JDEvolution Plus
EVSDPF35:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 35 JDEvolution Plus
EVSDPF60:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 60 JDEvolution Plus
EVSDCAF	Wkrętak do łącznika typu Multi-unit dla JDTorque
EVSDP20:	Wkrętak protetyczny L 20 JDEvolution Plus
EVSDP25:	Wkrętak protetyczny L 25 JDEvolution Plus
EVSDP30:	Wkrętak protetyczny L 30 JDEvolution Plus
JDID105	Wkrętak protetyczny JDEvolution Plus do narzędzi chirurgicznych
EVSDCA	Wkrętak do łącznika typu Multi-unit
EVSDPF25A	Wkrętak do kątovej śruby dla JDTorque L 25
EVSDPF30A	Wkrętak do kątovej śruby dla JDTorque L 30
EVSDPF25AV	Wkrętak do kątovej śruby dla Multi-Unit Direct JDTorque L 25
EVSDPF30AV	Wkrętak do kątovej śruby dla Multi-Unit Direct JDTorque L 30
EVSDP32AV	Wkrętak do śruby Multi-Unit Direct EVS112 (kanał prosty)
EVSUD	Narzędzie chirurgiczne JDEvolution
JDG	JDGuide
EVGMC	Implant Mounter dla JDEvolution
EVGMLC	Implant Mounter długi dla JDEvolution
JDID102	Narzędzie ZAPA
JDSPR	Sonda głębokościowa implantów stomatologicznych



Wskaźniki kierunku:

JDDI	Wskaźnik kierunku
JDDIS	Wskaźnik kierunku krótki
JDDI17	Wskaźnik kierunku 17°
JDDI30	Wskaźnik kierunku 30°
JDDI45	Wskaźnik kierunku 45°

